

## Wetgeving en veiligheid

Voor de meest actuele wetgeving omtrent kinderzitjes verzoeken wij u de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te bezoeken, [www.veiligheid.nl](http://www.veiligheid.nl). Woont u in België? Bezoek dan de website van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, [www.bivv.be](http://www.bivv.be).



Bij gebruik van de zitverhoger met autofixatiesysteem blijft gebruik van de standaard 3-punts veiligheidsgordel verplicht.



Het gebruik van het zitverhoger met autofixatiesysteem is te allen tijde op eigen risico.



Draai de afsluitbare steekgespen alleen extra op slot als dit echt nodig is.



Wij adviseren (zeker bij gebruik door derden) om met alle betrokkenen af te stemmen dat een persoon vervoerd wordt met een zitverhoger met autofixatiesysteem.



Zorg dat de meegeleverde gordelsnijder binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is.

## Afsluitbare steekgespen



Draai deze alleen op slot indien het echt noodzakelijk is! Probeer na verloop van tijd eens uit of u wellicht alle of een aantal van de zeven steekgespen niet meer op slot hoeft te draaien.

## CE-markering



Wij verklaren hierbij dat het geïntegreerde Eerluck Autofixatiesysteem voldoet aan de gelijkwaardige regels van het medisch product en de richtlijn 93/42EEG.

## Onderhoud



Het geïntegreerde Eerluck Autofixatiesysteem kan afgenomen worden met een licht vochtige doek. Gebruik voor reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen en was ze niet in de wasmachine! Voor de wasvoorschriften van de hoezen van de Cybex Solution T i-Fix verwijzen wij u graag naar de handleiding van de zitverhoger.

# Gebruikershandleiding

# Zitverhoger met autofixatiesysteem



**eerluck**

VOOR EEN EERLUCK ADVIES

Jelle Zijlstraweg 66D  
1689 ZX ZWAAG  
Telefoon +31 (0)229 745 070  
[info@eerluck.nl](mailto:info@eerluck.nl)  
[www.eerluck.nl](http://www.eerluck.nl)

Versie 3/24-03-2026

**eerluck**

VOOR EEN EERLUCK ADVIES

## Aandachtspunten juiste instelling

Het is belangrijk dat het fixatievest juist ingesteld is. Zorg ervoor dat de verbindingsbandjes tussen het vest en de basisband op de juiste lengte afgesteld zijn, niet te los en zeker ook niet te strak. Het fixatievest moet comfortabel zitten voor degene die erin plaats neemt.

Bevestig te allen tijde de verplichte 3-punts veiligheidsgordel welke in de auto/taxibus aanwezig is!

Zorg ervoor dat het fixatievest niet te hoog gemonteerd is.

Montagepunten ter hoogte van de oksel, bevinden zich bij de oksel.

Montagepunten ter hoogte van de heup, bevinden zich bij de heup.

Voor extra stevigheid kan ervoor gekozen worden de basisband om de rugleuning van de achterbank/autostoel te bevestigen. Zo 'klemt' de zitverhoger tegen de achterbank/autostoel.

Zorg ervoor dat de verbindingsbandjes als volgt door de laddergespen geregen worden.



## Instellen rughoogte

Het autofixatiesysteem is in de zithoger gemonteerd. U kunt de rughoogte van de combinatie als volgt instellen. Ontgrendel aan de achterzijde de klepsluiting van het 7e punt en geef de band ruimte (1). Vervolgens ontgrendelt u de veiligheidssluiting van de basisband (2).

Verhoog/verlaag de rugleuning van de zitverhoger tot de benodigde hoogte d.m.v. de verstelknop van de zitverhoger (A en zie gebruikershandleiding zitverhoger). Positioneer vervolgens aan de voorzijde van de stoel het fixatievest op de juiste hoogte (3/4). Vergeet hierbij niet de schouderbandjes juist door te voeren.

Trek aan de achterzijde de basisband aan en fixeer deze d.m.v. de veiligheidssluiting (2). Trek vervolgens de band van het 7e punt aan en fixeer deze d.m.v. de klepsluiting (1).

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgespen. Stel de gewenste lengte van de verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven.



Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto!

*NB, afgebeelde zitverhoger wijkt af van geleverde zitverhoger, instelmogelijkheden zijn gelijk.*

