

Gebruikershandleiding

# Carrot 3



*eerluck*

VOOR EEN EERLUCK ADVIES

# Inhoud

	Pagina
Inleiding	3
Veiligheidsadvies	4/5
Certificering	5
Belangrijke aandachtspunten	6
Kenmerken	7
Standaard montage	8
Isofix montage	8
Zijwaarts beschermkussen (verplicht)	9
Hoofdsteun	10
Schoudersteun	10/11
5-Punts fixatie	12/13
Rugleuning	13
Zitting	14
Zitverkleiningsset	15
Optionele voetsteunen	16
Optioneel afneembaar gepolsterd werkblad	16
Optioneel wigkussen	16
Optioneel Anti-Escape vest	17
Optionele incontinentiehoes	17
Veilig vastzetten van uw kind	18/19
Gebruik van Carrot 3 autostoel in een vliegtuig	20/21
Verzorging en onderhoud	22
Garantie	23
Gegevens aangekochte Carrot 3	23

## Inleiding

De Carrot 3 autostoel is ontwikkeld om extra steun te geven aan kinderen die moeite hebben om op de juiste manier te zitten in een standaard autostoel.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de Carrot 3 autostoel. Denk hierbij aan veiligheid en methodes om een optimale zithouding te realiseren. Lees alle informatie in deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de Carrot 3 in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Zorg dat iedereen die van de Carrot 3 gebruik maakt op de hoogte is van de inhoud van deze handleiding en begrijpt hoe hij/zij de Carrot 3 veilig kan gebruiken.

Deze instructies vormen een leidraad voor de diverse instellingen ten behoeve van professionals, maar ze bieden ook informatie over hoe de Carrot 3 veilig kan worden gebruikt, onderhouden, gecontroleerd en op de juiste wijze in elkaar kan worden gezet door ieder die het zitsysteem gebruikt.

Het is aan te bevelen een ervaren persoon te betrekken bij het toepassen en instellen van het product. Deze deskundige kan de eindgebruiker optimaal gebruik laten maken van de Carrot 3 op het gebied van comfort en ondersteuning. Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het toepassen en instellen van de Carrot 3, neem dan altijd contact op met uw dealer. De contactgegevens vindt u achterin deze handleiding.

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product, we hopen dat u veel plezier en gebruiksgemak zult hebben van uw Carrot 3 autostoel.

## Veiligheidsadvies

RehaNorm Bingen GmbH staat garant voor de levering van producten die aan de hoogste eisen voldoen. De producten uit het leveringsprogramma voldoen aan de essentiële veiligheid- en milieueisen, zoals deze in de Europese richtlijnen zijn vastgelegd. Maar een onjuist gebruik van de producten brengt gebruikers mogelijk in gevaar en daarom raadt RehaNorm Bingen GmbH u sterk aan de volgende informatie te allen tijde ter harte te nemen.



Verspreid door de handleiding vindt u aandachtspunten, aangegeven met dit symbool.

- Gebruik is alleen toegestaan door kinderen met een gewicht tussen de 15 en 36 kg (Klasse II en III). De Carrot 3 is succesvol getest en goedgekeurd volgens ECE R129/03 met een Q3 dummy (smalle configuratie voor kinderen tussen 80-90 cm) en een Q3 dummy (grote configuratie voor kinderen tussen 95-150 cm). De wetgeving in verschillende landen binnen Europa (als in Nederland) staat het toe om kinderen lichter dan 15 kg en jonge cliënten tussen de 36 en 50 kg te vervoeren. In de meeste landen heeft u een verklaring van een arts nodig dat u dit kind mag vervoeren in deze autostoel.
- Gebruik de Carrot 3 alleen in de rijrichting.
- Wijzig nooit iets aan de constructie van de Carrot 3, tenzij dit in het bijzonder vermeld is in deze gebruikershandleiding.
- Stel de gordels van de autostoel zo in dat deze uw kind goed fixeren. Een juist aangebrachte gordel heeft geen speling en zit niet gedraaid. De gordel drukt niet tegen het kind zijn/haar lichaam en drukt het kind niet in een onnatuurlijke houding.
- Bevestig deze autostoel met de bovenste en onderste bevestigingsbanden aan de autostoel/-bank. Gebruik altijd de standaard 3-puntsgordel die in de auto aanwezig is!
- Bevestig de 5-punts fixatie van de Carrot 3 en de standaard 3-puntsgordel stevig zodat het kind goed in de stoel zit.
- Volg alle instructies op de autostoel en in deze handleiding nauwkeurig.
- Gebruik deze autostoel alleen in auto's met een 3-puntsgordel volgens ECE regeling 16 of andere gelijke standaards.
- Om letsel door verborgen schade te voorkomen, gebruik de autostoel niet meer na een matig of ernstig ongeluk.
- Gebruik de autostoel niet zonder bekleding/hoezenet.
- De bekleding/hoezenet mag/mogen alleen vervangen worden voor een door de fabrikant geadviseerde bekleding/hoezenet.
- De handleiding dient opgeborgen te worden in de zak achterop de rugleuning van de autostoel.


- Deze autostoel mag niet gebruikt worden in huis, op een boot of andere niet gecertificeerde toepassingen.
- De achterbank van de auto is de meest veilige plaats voor een correcte montage van de autostoel. Stel de veiligheid van uw kind voorop en neem de gebruikershandleiding van uw auto door.
- Als de Carrot 3 gebruikt wordt in een auto met airbags, neem de gebruikershandleiding van uw auto door voor de montage van de autostoel.
- Til de autostoel nooit op aan de verstelknop of aan de 5-punts fixatie. Dit kan schade veroorzaken aan de verstelknop en de gordelband van de fixatie. Draag de autostoel altijd aan de schaal van de autostoel.
- Demonteer nooit de fixatie en gordelbanden uit de autostoel. Verwijder nooit de gespen of de gespssluitingen van de fixatie of de gordelbanden. Ze kunnen niet opnieuw bevestigd worden na verwijdering. Als deze incorrect zijn gemonteerd kan de autostoel niet functioneren als beoogd.
- De primaire bescherming van inzittende in een auto bij een ongeluk zijn de 3-puntsgordel en het chassis van de auto zelf; een autostoel kan een kind niet beschermen als een auto zwaar beschadigd is. Hoe dan ook, een juist gemonteerde autostoel zal deze de kans op overleven vergroten. Wees er zeker van dat alle gebruikers op de hoogte zijn van het op de juiste manier gebruiken van de Carrot 3!
- Wanneer de Carrot 3 niet in gebruik is, dient deze ook vastgezet te zijn in de auto. In geval van een ongeluk kan een 'losse' autostoel de inzittende(n) verwonden.
- Gebruik de Carrot 3 niet wanneer deze niet correct (volgens deze gebruikershandleiding) is gemonteerd. Gebruik geen andere gordels of polsteringen als beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik de Carrot 3 niet (zonder test van de leverancier), wanneer u een ongeluk met de autostoel heeft gehad.
- Gebruik de Carrot 3 niet op de bijrijdersstoel wanneer de versnellingspook en/of handrem gehinderd worden.
- Gebruik geen beschadigde 3-puntsgordels.
- Gebruik de Carrot 3 niet in auto's waar geen 3-puntsgordel aanwezig is.
- Gebruik de Carrot 3 niet in auto's met een 2-puntsgordel.
- Bevestig de Carrot 3 niet in zijwaartse of achterwaartse rijrichting. Gebruik de Carrot 3 niet op een autostoel met een kleinere zitdiepte van 40 cm.
- Gebruik de Carrot 3 niet op een zwaar geprofileerde autostoel, dit kan tot instabiliteit leiden.

## Certificering



De Carrot 3 autostoel is getest en goedgekeurd volgens de European Safety Standard, ECE R129/03 (Klasse I en II).

## Belangrijke aandachtspunten

- Wees er zeker van dat de autostoel correct is gemonteerd met de bovenste en onderste bevestigingsbanden. Zorg ervoor dat de fixatie juist is gemonteerd, elke keer wanneer de autostoel gebruikt wordt.
- Pas de fixatie aan op de kleding die het kind draagt. Verwijder grote jassen voor het kind plaats neemt in de autostoel.
- Bescherm de autostoel wanneer de auto in de zon geparkeerd staat. Onderdelen van de autostoel kunnen zo heet worden dat het kind zich eraan kan branden.
- Berg de Carrot 3 op een veilige plaats op wanneer deze niet gebruikt wordt. Plaats geen zware voorwerpen op de autostoel.
- Laat uw kind niet alleen achter in de auto, ook niet voor een korte tijd.
- Demonteer nooit onderdelen van de Carrot 3 en wijzig nooit de montagewijze van de fixatie en/of de gordelbanden.
- Laat geen losse voorwerpen als boeken, tassen enz. slingeren achterin de auto. Bij een plotselinge stop kunnen deze voorwerpen letsel veroorzaken.
- Gebruik voor fixatie op uw Isofix-bevestiging de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging of de draaiplaat met Isofix-bevestiging. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de stoel gefixeerd wordt d.m.v. de meegeleverde bovenste bevestigingsbanden.
- Een wijziging van en/of aan de Carrot 3 geschiedt geheel op eigen risico en onder uw eigen verantwoording. Eerluck BV is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door oneigenlijk gebruik.
- Gebruik de meegeleverde polstering, dit zorgt voor de stevigheid van de constructie.
- Controleer regelmatig de Carrot 3, zeker indien u veel op 'slecht' wegdek rijdt.
- Gebruik niets om de autostoel verhoogd op een autostoel/-bank te monteren. Bij een ongeluk kan de autostoel gaan schuiven en kan deze het kind niet correct meer beschermen.
- Verbiedt kinderen te spelen met de Carrot 3.
- Er wordt aangeraden de Carrot 3 in de rechtopstaande positie te gebruiken.
- Wanneer u de rugleuning naar achter plaatst, moet u de fixatie losser instellen. Als de rugleuning weer rechtop geplaatst wordt, zult u de fixatie weer aan moeten trekken. Het naar achter plaatsen van de rug zonder het verstellen van de fixatie kan druk en/of verstikkingsgevaar opleveren. De Carrot 3 autostoel is getest tot een 30° zithoek. Deze mag niet voorbij dit punt in een rijdend voertuig gebruikt worden.

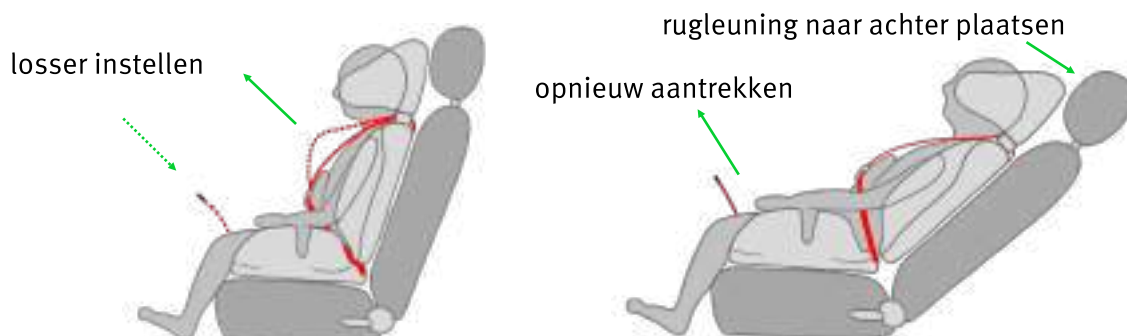


# Kenmerken

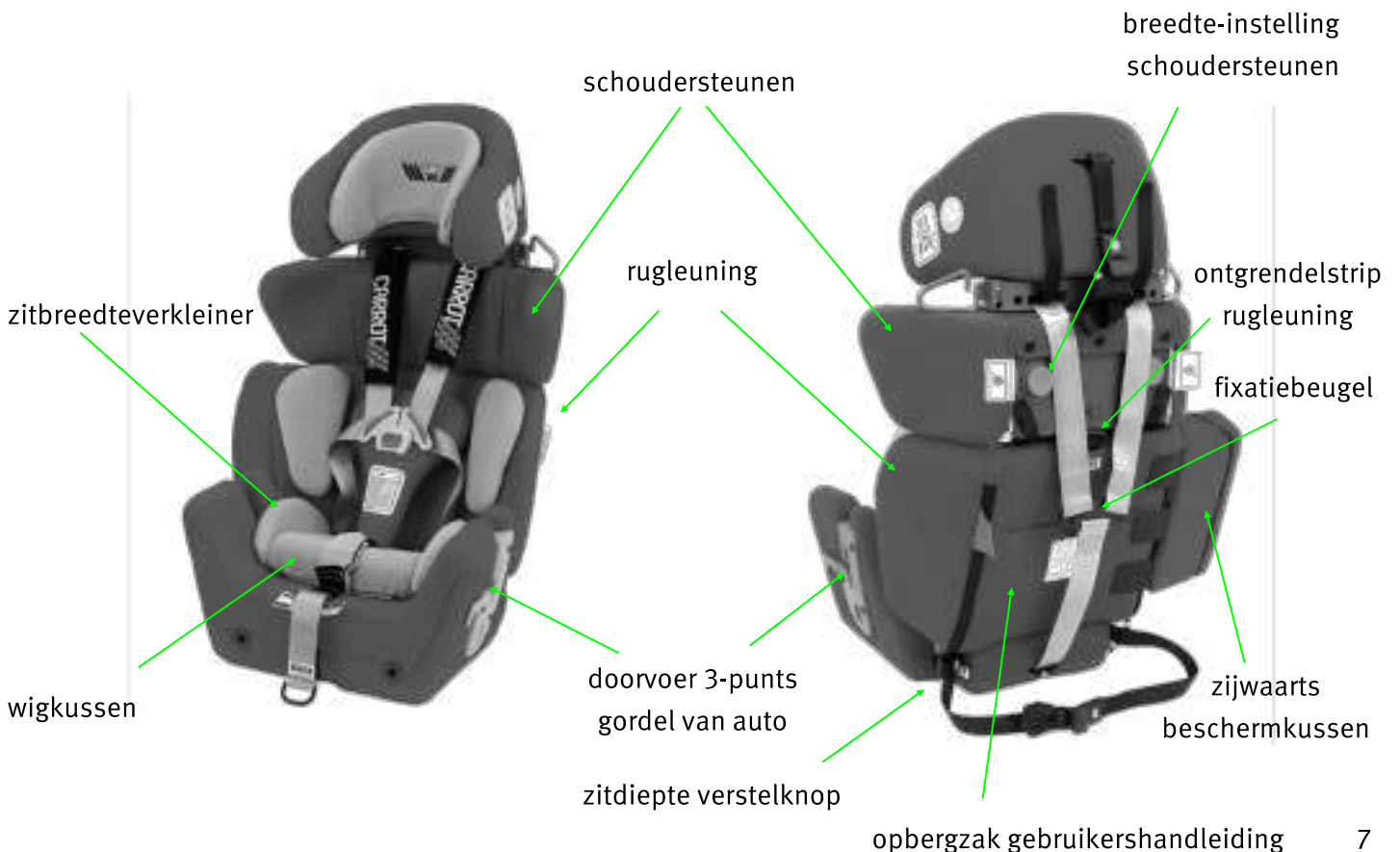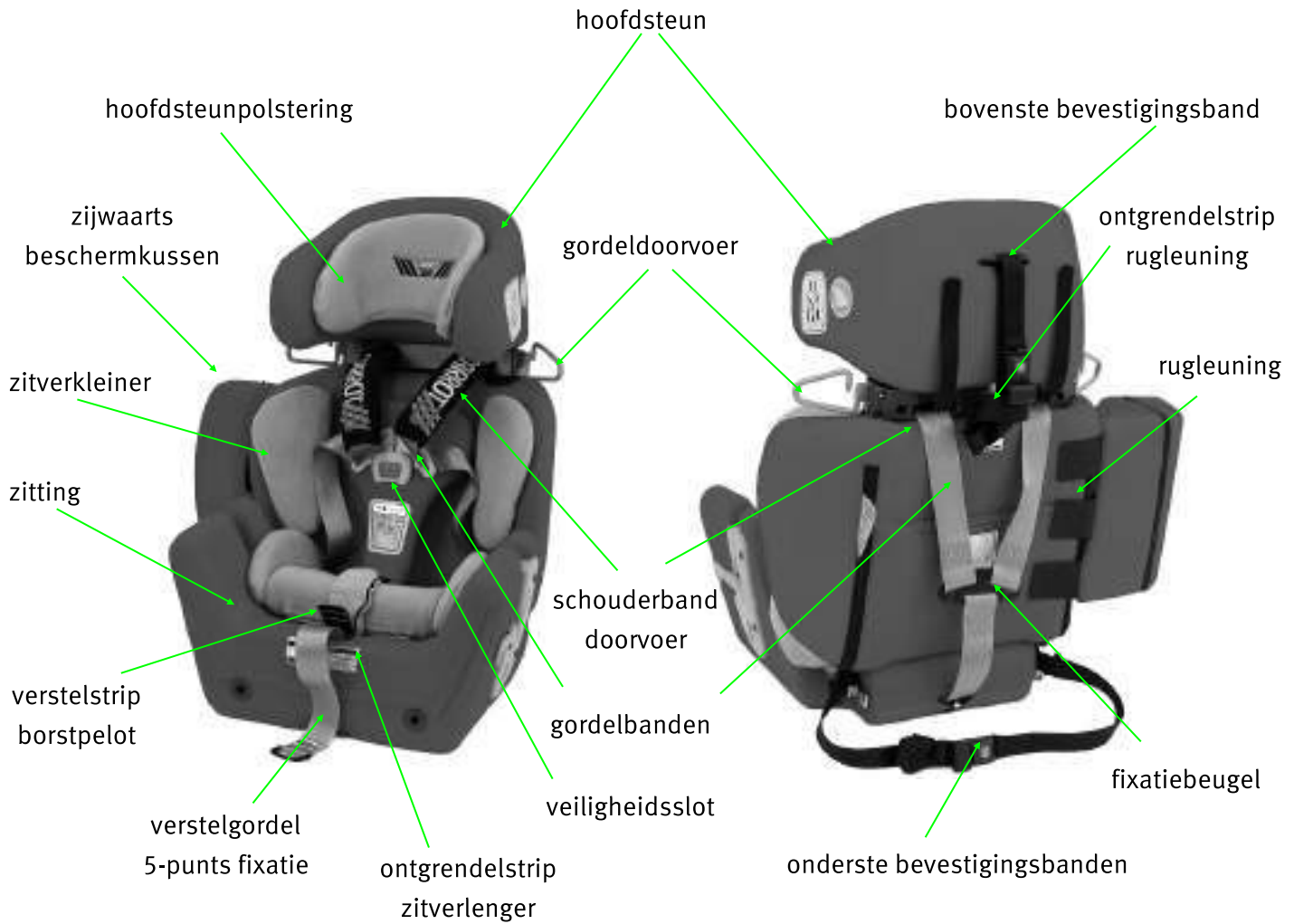

## Standaard montage

Indien uw auto niet is uitgerust met Isofix-bevestiging moet u de meegeleverde bevestigingsbanden gebruiken.


1. Montage van de bevestigingsbanden dient boven en onder aan de autostoel te gebeuren.
2. Bevestig de bovenste bevestigingsband aan de hoofdsteun van de auto. De onderste bevestigingsband gebruikt u om de Carrot 3 goed op de autostoel/-bank te plaatsen (A).
3. Maak de steekgespen vast en duw de Carrot 3 strak tegen de autostoel aan door de bevestigingsbanden aan te trekken (B).
4. Zorg ervoor dat er geen speling meer in de bevestigingsbanden zit.

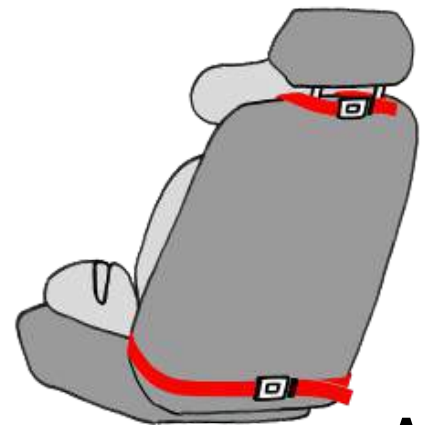

**A**




Indien u de Carrot 3 op de passagiersstoel wilt monteren plaats de stoel dan zo ver mogelijk naar achter. Dit zodat er geen eventuele schade kan ontstaan door de airbag.

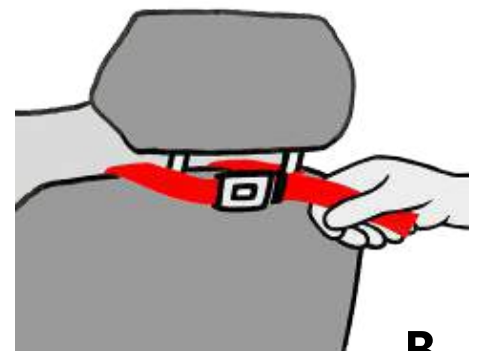

**B**

- Indien de Carrot 3 gemonteerd wordt op een achterbank kunnen de bevestigingsbanden te kort zijn. U kunt de bevestigingsbanden dan verticaal monteren.
- Heeft u moeilijkheden met het monteren van de autostoel? Neem alstublieft contact op met de dealer.

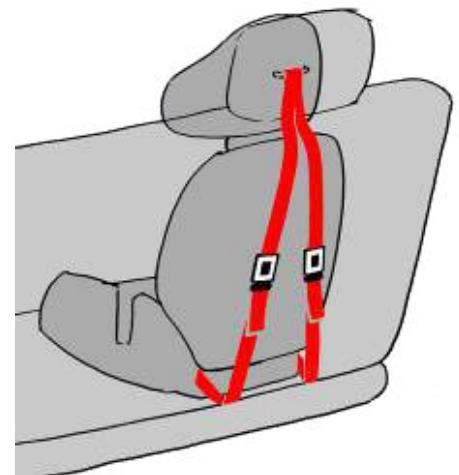

## Isofix montage

Mocht u de Isofix-bevestigingspunten in uw auto willen gebruiken om de Carrot 3 autostoel te monteren, dan kunt u hier de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging voor gebruiken. Monteer te allen tijde de bijgeleverde bovenste bevestigingsband aan de standaard autostoel (A).



De Carrot 3 moet gemonteerd worden met de bovenste en onderste bevestigingsbanden. Het is niet afdoende om de autostoel alleen met de standaard 3-puntsgordel te fixeren. De onderste bevestigingsbanden worden in geval van montage met Isofix-bevestiging vervangen door de optionele Isofix-bevestigingsplaat. Indien u de bevestigingsbanden niet gebruikt kan de autostoel niet functioneren als beoogd en loopt uw kind risico op ernstig letsel.

## Zijwaarts beschermkussen (verplicht)

Het zijwaarts beschermkussen zorgt voor een goede zijwaartse bescherming. Ze absorberen zijwaartse krachten zo goed als mogelijk, vooral bij de hoofdsteun en schouders. Ze zitten bevestigd d.m.v. klittenbandstroken aan de buitenkant van de rugleuning op links of rechts. Bevestig ze aan de kant waar het deurportier zich bevindt.



Let erop dat u het kussen zo bevestigd dat de ritssluiting zich aan de achterzijde bevindt (A).



Het zijwaarts beschermkussen is verplicht en moet bevestigd zijn bij gebruik in een auto!



## Hoofdsteun


### Hoofdsteunverstelling

De hoofdsteun kan aangepast worden aan de individuele wensen voor betere bescherming (A). De hoofdsteun kan daarnaast 1,5 cm voorwaarts en 1,5 cm achterwaarts geplaatst worden (B/C). Maak hierbij gebruik van één van de drie bevestigingsgaten (1/2/3)

Om de hoofdsteun voor- en/of achterwaarts te verstellen heeft u een schroevendraaier nodig.



A

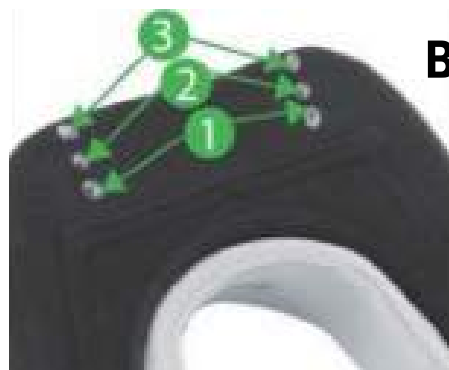

B



C

### Hoofdsteunverkleiner

Het verkleiningspolsterdeel van de hoofdsteun kan eenvoudig d.m.v. de klittenbandbevestiging op de gewenste positie worden gemonteerd.




## Schoudersteun

### Breedte-instelling schoudersteun

De schoudersteun kan d.m.v. vijf posities maximaal 10 cm verbreed worden, 5 cm aan beide zijden.

Druk de gele verstelknop (A) in. Houd deze ingedrukt terwijl u de steun uit trekt tot de gewenste positie.

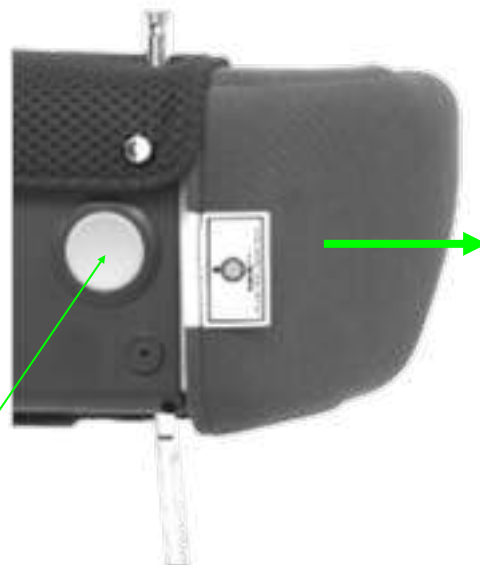

A

## Monteren schoudersteun

- Demonteer de schouderbanden van de 5-punts fixatie aan de achterzijde van de Carrot uit de bevestigingshaak (A).
- Verwijder de 5-punts fixatie en de bandbeschermers van de hoofdsteun (B).
- Druk op de knop en verwijder de hoofdsteun van de rugleuning (C/D).
- Verwijder de twee schroeven (2) van de hoofdsteun (E).
- Steek de hoofsteunpinnen in de schoudersteun en druk ze aan (F).
- Lijn de gaten op de stangen uit, draai de twee schroefjes weer vast (G).
- Zet de hoofdsteun/schoudersteuncombinatie bovenop de rugleuning. Bevestig de 5-punts fixatie opnieuw (H).



## 5-Punts fixatie

### Sluiten veiligheidssluiting

Houd de veiligheidssluiting met één hand vast. Gebruik uw andere hand om de insteekdelen in de sluiting te drukken (A). Indien u beide insteekdelen juist in de sluiting heeft gedrukt hoort u een klik.



### Openen veiligheidssluiting



Om de veiligheidssluiting te openen drukt u eenvoudig op de rode knop (B) en verwijder de insteekdelen uit de sluiting.



### Instelling schouderbanden 5-punts fixatie

Om de schouderbanden van de 5-punts fixatie strakker te bevestigen trekt u eenvoudig aan de verstelgordel (C).

Indien u de 5-punts fixatie lossier wilt instellen druk u de rode ontgrendelingsknop in. Houdt deze ingedrukt en trek de 5-punts fixatie lossier (D).

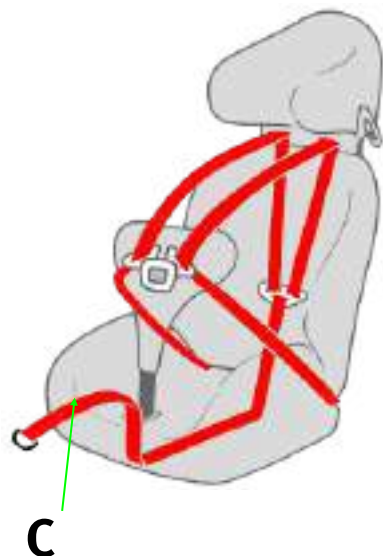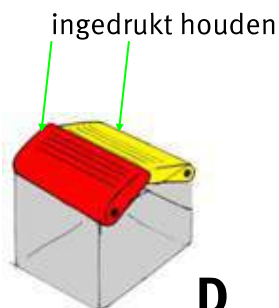

### Instellen van het borstpelot


Indien u het borstpelot van de 5-punts fixatie op de juiste hoogte wilt instellen druk u de gele ontgrendelingsknop in. Houdt deze ingedrukt en stel het borstpelot in (D).



Trek niet aan de bandbeschermers van de 5-punts fixatie aangezien deze vast zit aan de rugleuning! Trek en stel de 5-punts fixatie lossier in d.m.v. de gordelbanden!



De bovenzijde van het borstpelot moet lager zijn dan het keelgebied! Indien u het borstpelot hoger aanbrengt heeft u kans op verstikking.

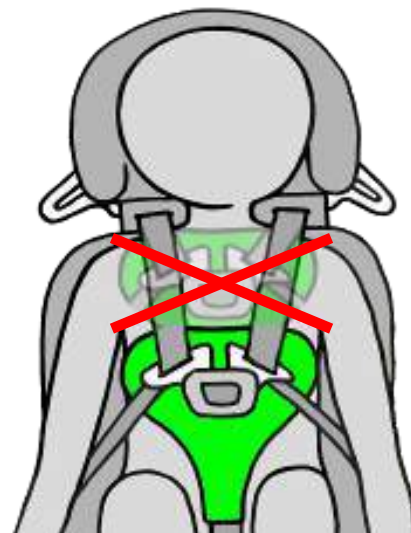

## Verlengen gordelband 5-punts fixatie

- Draai de zwarte knop los en verwijder deze (A).
- Scheid de rugleuning van de zitting.
- Trek de gordel van de zitbuis.
- Bevestig de gordel door de lagere lus.
- Vouw voor het terugplaatsen de lus van het weefsel naar binnen zodat het bevestigingsgebied niet door de riem wordt bedekt (B).
- Draai de knop weer vast. Het is belangrijk dat de achterbuis zich tussen de zitbuis en de grijze plastic hoes bevindt voordat u deze weer in elkaar zet (C).




## Rugleuning



De hoogte van de schouderbanden van de 5-punts fixatie zijn gelijk met de hoogte van de rugleuning.

De doorvoer van de schouderbanden moet gelijk of boven de schouders van het kind zitten, parallel aan de vlakke ondergrond.

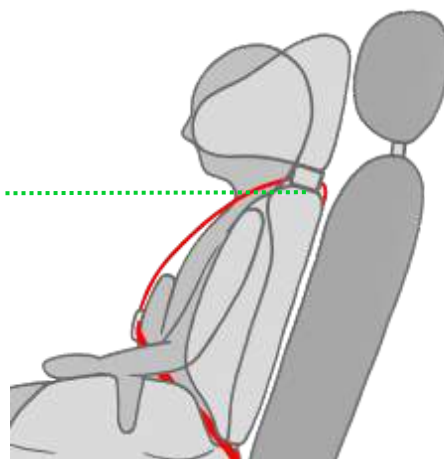

## Instellen van de rughoogte

Ontgrendel de verstelling door aan de D-ring aan achterkant/bovenzijde van de rugleuning te trekken (A).

Trek met één hand aan de D-ring en til met de andere hand de rugleuning omhoog. Stel zo de gewenste hoogte in (B).



## Optionele rugverlenging


Als uw kind groter wordt kan het noodzakelijk zijn dat de rugleuning verlengd wordt. Om de open ruimte onderin de rugleuning op te vullen schaft u een rugverlenging aan. Deze zijn er in twee maatvoeringen, 5 en 10 cm hoog en worden eenvoudig op de rugstangen geklikt.



## Zitting


### Instellen van de zitdiepte

Standaard kan de zitdiepte tot 3,5 cm vergroot worden d.m.v. de zitdiepteverstelknop (A) aan de onderzijde van de rugleuning. Vraag een deskundige om advies!

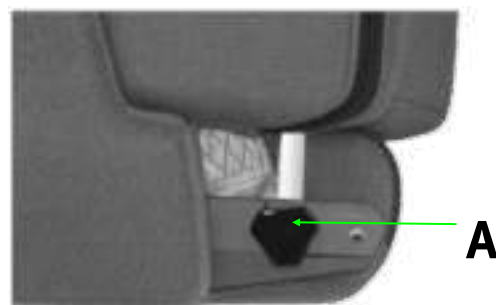

### Vergroten van de zitdiepte

Ontgrendel de verstelling door aan de zwarte nylon band met D-ring (B) te trekken. Stel de gewenste zitdiepte in van de insteekbare zitverlenger.

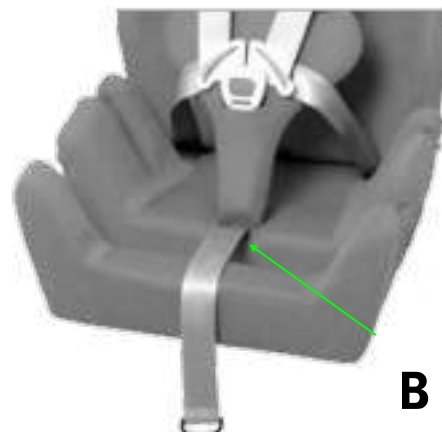

### Optionele insteekbare aflopende zitverlenging

Voor kleine kinderen is er een speciale insteekbare zitverlenging verkrijgbaar. Deze zitverlenging is 18 cm lang en loopt af. Op deze manier worden de benen compleet ondersteund, dus ook de onderbenen.



### Optionele insteekbare vlakke zitverlenging

Als uw kind groter wordt kan het noodzakelijk zijn dat de zitting verlengd wordt. U kunt de insteekbare vlakke zitverlenging aanbrengen om een extra zitdiepte van 5 cm te creëren.



### Optionele zitverlenging

Als uw kind groter wordt kan het noodzakelijk zijn dat de zitting verlengd wordt. Om de open ruimte in de zitting op te vullen kunt u desgewenst een zitverlenging aan schaffen. Deze zijn er in twee maatvoeringen, 5 en 10 cm lang en worden eenvoudig op de stangen van een insteekbare zitverlenging of beensteun geklikt.



## Zitverkleiningsset en zijwaards beschermkussen

Standaard wordt de Carrot 3 geleverd met een set zitverkleiners en zijwaards beschermkussen. De zitverkleiners kunnen desgewenst eenvoudig aangebracht en/of verwijderd worden d.m.v. klittenband. Het zijwaards beschermkussen is daarentegen verplicht en moet altijd aangebracht worden aan de kant waar het portier van de auto zich bevindt!

### Hoofdkussen

Gebruik het hoofdkussen om de meest comfortabele en veilige positie van het hoofd te creëren.

### Zijkussens rugleuning

Gebruik de zijkussens van de rugleuning om de meest comfortabele, veilige en stabiele positie van de romp te creëren.

### Zijkussens zitting


Gebruik de zijkussens van de zitting om de meest comfortabele, veilige en stabiele positie van de romp te creëren.

### Zitverhoger

Gebruik de zijkussens van de zitting om de meest comfortabele zit te creëren en voorkom onderuitzakken.

### Zijwaarts beschermkussen (verplicht)

Dit verplichte beschermkussen wordt of links of rechts (aan de kant waar het portier van de auto zich bevindt) aangebracht d.m.v. klittenbandstroken.

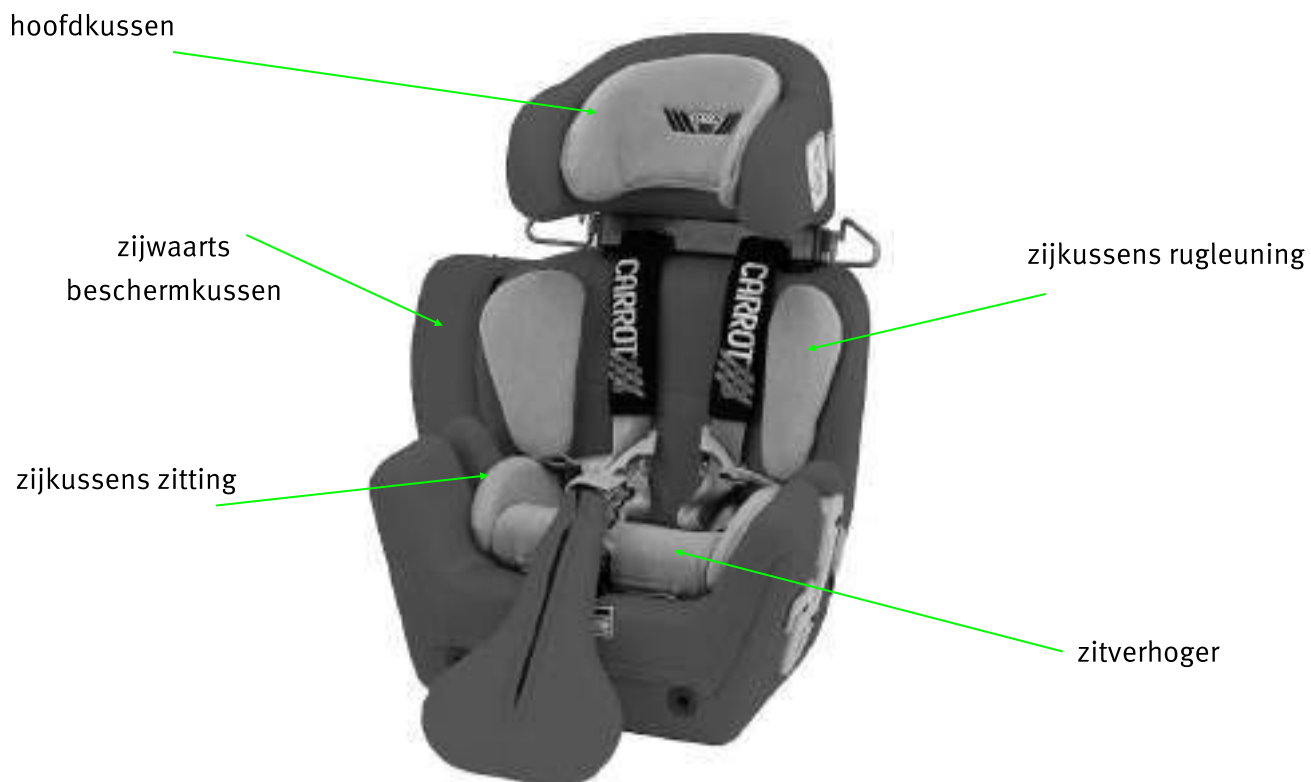

## Optionele voetsteunen

Om het comfort te vergroten kan de Carrot 3 voorzien worden van voetsteunen. De voetsteunen zijn in hoogte instelbaar en opklapbaar. Daarnaast zijn ze voorzien van fixaties. Verkrijgbaar in 3 maatvoeringen; maat S, onderbeenlengte 25-31 cm  
maat M, onderbeenlengte 30-41 cm  
maat L, onderbeenlengte 35-46 cm



## Optioneel afneembaar gepolsterd werkblad

Wanneer het wenselijk is, kan de Carrot 3 voorzien worden van een afneembaar werkblad. Met dit werkblad worden de bovenste extremiteiten ondersteund.



## Optioneel wigkussen

Standaard biedt de zitondersteuning van de Carrot 3 in de meeste gevallen voldoende zitstabiliteit. Mocht het echter noodzakelijk zijn om meer stabiliteit te creëren, dan kan dit d.m.v. het optionele wigkussen. Met dit kussen kunnen kinderen met een lagere basistonus comfortabel in de Carrot 3 zitten. Het kussen is eenvoudig in gebruik en licht van gewicht. Indien het noodzakelijk is een kleine hoek tussen romp en benen bij kinderen te creëren geeft dit kussen de nodige ondersteuning.



## Optioneel Anti-Escape vest



Voorkom dat een kind zich uit de 5-puntsgordel klimt met het anti-escape vest. Deze wordt op de volgende wijze bevestigd;

- Maak de 5-puntsgordel aan de achterzijde bij de fixatiebeugel los en trek het gordelband uit de schouderpads.
- Leg het anti-escapevest in de rugleuning en haal de gordelbanden door de tunnels van het anti-escapevest en door de schouderpads.
- Haal vervolgens de gordelbanden door de zwarte doorvoer van het anti-escapevest.
- Steek de gordelband door de gordelgeleider naar de achterzijde van de stoel en maak het gordelband weer vast aan de fixatiebeugel.



## Optionele incontinentiehoes



Ter bescherming van de bekleding van de Carrot kan een incontinentiehoes uitkomst bieden. Deze bevestigd u op de volgende wijze;

- Maak de 5-puntsgordel los en leg deze voor de zitting.
- Leg de incontinentiehoes op de zitting en plaats de hoeken juist. Trek aan de achterzijde de hoeken tussen de rugleuning en zitting.
- Haal het borstpelot omhoog en druk de bevestigingsbandjes vast om het gordelpunt.
- Bevestig vervolgens de overige vier bevestigingsbandjes aan de zitting en rugleuning met klittenband.




## Veilig vastzetten van uw kind

Als u de Carrot 3 autostoel juist in de auto heeft gemonteerd neem dan de volgende instructies door om uw kind veilig te vervoeren;

- Stel de 5-punts fixatie losser d.m.v. de rode verstelknop aan de voorzijde van de autostoel. Druk de knop in en trek de schouderbanden naar voren (A).
- Maak de veiligheidssluiting los door op de knop te drukken (B).
- Breng de schouderbanden aan de zijkant van de stoel (C) en plaats het kind in de stoel (D).
- Breng de schouderbanden aan en sluit de veiligheidssluiting. U hoort een klik bij juiste montage (E).
- Trek voorzichtig aan de schouderbanden om de heupbanden strakker te zetten (F). De heupbanden moeten laag gepositioneerd zijn.
- De standaard 3-puntsgordel uit de auto is absoluut nodig om uw kind zo veiligheid mogelijk te vervoeren in de Carrot 3.
- Nadat u uw kind heeft gepositioneerd in de Carrot 3 met de 5-punts fixatie doet u de 3-puntsgordel uit de auto om. U haalt het heupgedeelte van de autogordel door de daarvoor bestemde gordeldoorvoer (groene plastic delen). Deze moet zo laag mogelijk bevestigd worden zodat de heup in de juiste positie wordt gehouden. U bevestigt de sluiting in het veiligheidsslot.



- Daarna haalt u de 3-puntsgordel door de gordeldoorvoer en geleid de gordel naar de gordeldoorvoer ter hoogte van de schouder.
- Nadat u de Carrot 3 autostoel en de 3-puntsgordel juist heeft gemonteerd moet u er zeker van zijn dat de nek en het gezicht van het kind niet geschaad kunnen worden. Check ook dat de veiligheidssluiting van de 3-puntsgordel lager zit dan de gordeldoorvoer van de Carrot 3. Dit is belangrijk aangezien het kind anders onder de gordel door kan slippen bij een ongeluk. Als de veiligheidssluiting hoger is dan de gordeldoorvoer, bespreek dit met uw dealer!
- De 3-puntsgordel van de auto moet vastgezet worden voor uw gaat rijden. Zorg ervoor dat de gordelband niet gedraaid zit.
- De borstpolstering moet zo gepositioneerd zijn dat de heupgordel zo diep mogelijk is zodat de heup juist gepositioneerd is en de veiligheidssluiting niet onder de band van de 3-puntsgordel zit.
- Als u twijfelt of de Carrot 3 autostoel en uw kind juist gemonteerd is, neem contact op met uw dealer!
- Trek altijd even aan de 5-punts fixatie om te controleren of de veiligheidssluiting goed vast zit.
- Parkeer uw auto een veilige plaats wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de autostoel. Bij het wijzigen van de autostoel terwijl u rijdt loopt u risico op ernstig letsel.
- Als u rijdt zal de autostoel in de rechtopstaande positie geplaatst moeten worden. Als de rugleuning te ver naar achter staat zal de autostoel niet de veiligheid kunnen bieden zoals bedoeld.

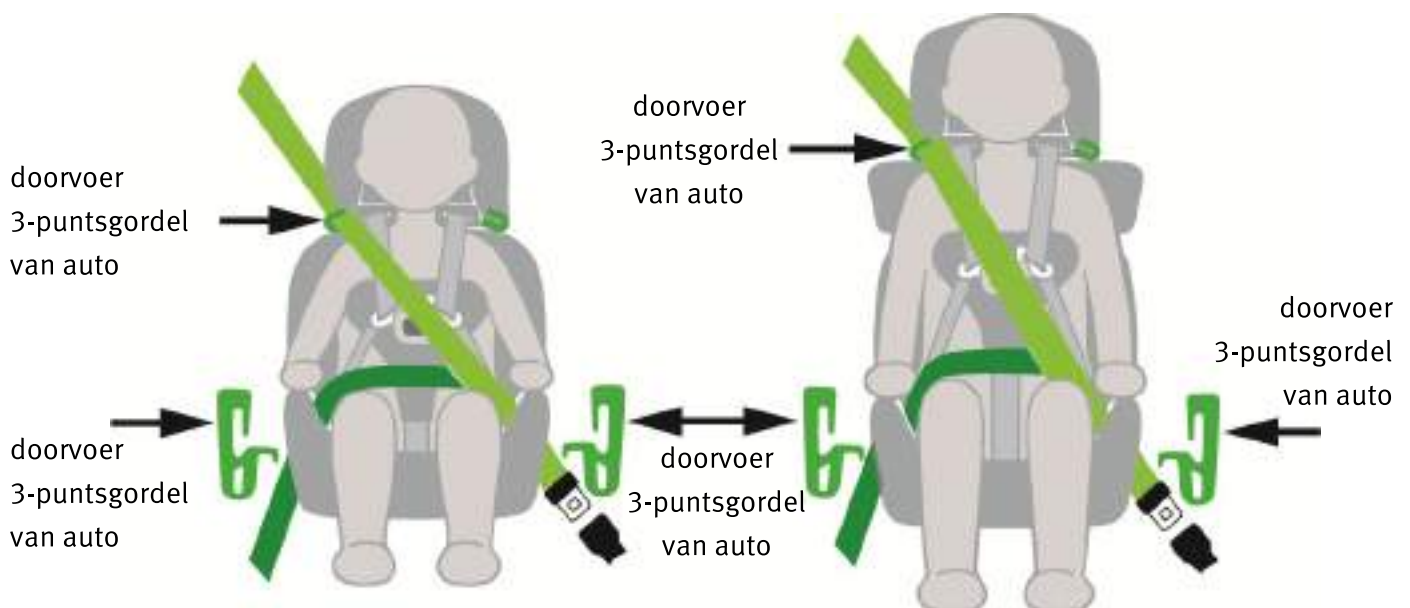

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de standaard 3-puntsgordel te gebruiken!



Het is niet afdoende om uw kind alleen te fixeren met de 5-punts fixatie van de Carrot 3.

Het is wettelijk gezien verplicht de 3-puntsgordel uit de auto te gebruiken bij het vervoeren van kinderen in een autostoel. Indien u de 3-puntsgordel niet gebruikt loopt u het risico op ernstig letsel.

## Gebruik van Carrot 3 autostoel in een vliegtuig

De meeste luchtvaartmaatschappijen laten het gebruik van een dergelijke autostoelen voor kinderen met een beperking toe mits het goed gemonteerd kan worden in het vliegtuig. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij over hun beleid omtrent het gebruik van een autostoel voordat u op reis gaat. De Carrot 3 autostoel is echter niet getest op gebruik in een vliegtuig.






- De FAA beveelt aan dat een kind met een gewicht tot 18 kg gebruik kan maken van een gecertificeerde autostoel tijdens het reizen met een vliegtuig.
- Installeer de autostoel altijd in een stoel bij het raam.
- Demonteer het zijwaarts beschermkussen bij gebruik in het vliegtuig.
- Als de standaard 2-punts veiligheidsgordel te kort is, vraag de stewardess om een gordelverlenger.
- De Carrot 3 autostoel is FAA gecertificeerd.
- Bij turbulentie is het het meest veilig om het kind in het fixatiesysteem van de autostoel vast te zetten, niet op schoot van een volwassene.
- Scan QR code voor instructievideo hoe de Carrot in een vliegtuig te bevestigen.

### Montageset gebruik Carrot 3 in vliegtuig

Als u een Carrot 3 autostoel in een vliegtuig wilt gebruiken, heeft u een montageset nodig. Deze gordel is lang genoeg om de Carrot rond de vliegtuigstoel te bevestigen. De montageset is zo gemaakt dat hij op elke vliegtuigstoel gemonteerd kan worden, op links, rechts en/of in het midden van een rij. Bevestig de montageset voor u aan boord gaat van het vliegtuig, er is geen gereedschap nodig. De set bestaat uit 3 delen; twee ontvangstdelen en een riem (A).


- Maak de sluiting van het borstpelot los (B).
- Demonteer de hoofdsteun, druk op de 2 zwarte knoppen (C/D).
- Rijg de ontvangstdelen om de hoofdsteunpinnen, het rode gordelpunt naar boven gericht houden (E).
- Druk de hoofdsteun weer op de rugleuning tot u een klik hoort (F/G).
- Het gordelband kan nu op de benodigde lengte afgesteld worden zodat de Carrot om de rugleuning van de vliegtuigstoel gemonteerd kan worden (H).



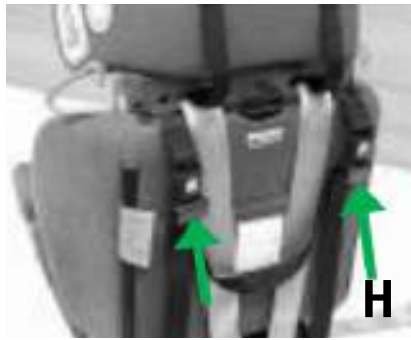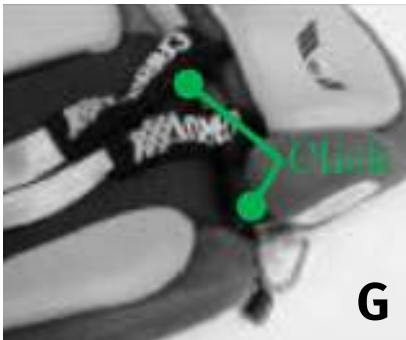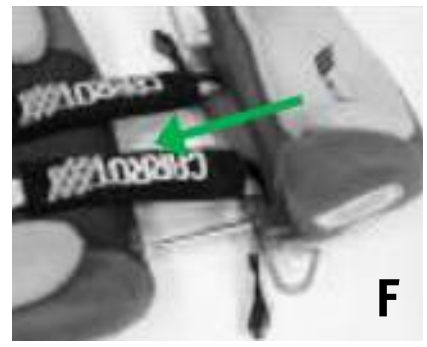

### Bevestigen van Carrot 3 op vliegtuigstoel

Zorg er allereerst voor dat de rugleuning van de vliegtuigstoel rechtop staat en zet de Carrot op de vliegtuigstoel. Bevestig het gordelband om de vliegtuigstoel en maak deze strak vast (I). Zet uw kind in de Carrot en sluit het borstpelot. Bevestig de 2-punts gordel van het vliegtuig (J)

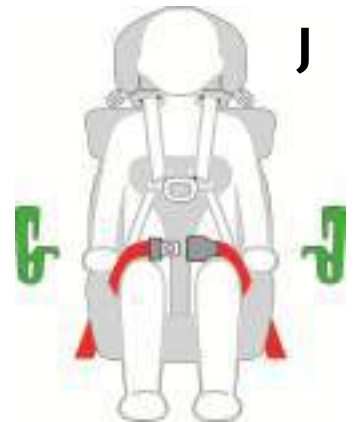

## **Verzorging en onderhoud**

### **Verwijderen van bekleding/hoezen**

Verwijder de bekleding/hoezen niet zelf aangezien het niet eenvoudig is en u heeft hier gereedschap voor nodig. Vraag uw dealer om de bekleding/hoezen te verwijderen/vervangen.

### **Reinigen van bekleding/hoezen, polstering en kussens**

Bekleding/hoezen; maak deze schoon met een spons en koud water met een zacht schoonmaakmiddel. Droog na met een handdoek.

Polstering en kussens; maak deze schoon in een handwas met koud water en een zacht schoonmaakmiddel. Bij voorkeur liggend laten drogen. Niet bleken, wassen in wasmachine, drogen in wasdroger en/of strijken. Schoonhouden is belangrijk, maar wassen kan schade aan de bekleding aanbrengen. Als uw schade aan de bekleding/hoezen heeft, dan dient dit vervangen te worden. Een periodieke vervanging is aan te raden.

### **Het 'klik'-geluid van de 5-punts fixatie**

Als uw kind wel eens eet en/of drinkt in de autostoel, dan dient u periodiek de veiligheidssluiting te checken. Als u de 'klik' niet hoort, dan moet u de veiligheidssluiting laten vervangen. Informeer bij uw dealer!

### **De 5-punts fixatie**

Demonteer nooit de 5-punts fixatie en verwijder nooit de veiligheidsgordel van de fixatie. Ze kunnen niet opnieuw aangebracht worden als ze gedemonteerd zijn geweest. De autostoel zal niet meer de veiligheid bieden die deze behoort te bieden.

# Garantie

## Beperkte eenjarige garantie

Wij bieden u een jaar garantie op de Carrot 3 autostoel. Ingangsdatum is datum van levering (zie originele factuur). U ontvangt garantie op materialen. Uw aankoopbewijs is in geval van garantie vereist.

Indien u bij een defect voor garantie in aanmerking wenst te komen, neem contact op met de dealer die de Carrot 3 aan u geleverd heeft. Uw aankoopbewijs is hierbij vereist.

## Garantievoorwaarden

U heeft geen garantie indien de schade is ontstaan door nalatigheid, verkeerd gebruik en/of indien de autostoel niet is gebruikt als beschreven in deze gebruikshandleiding.

Het gebruik van niet-Carrot 3 bekleding/hoezen, kussens, speelgoed, accessoires en/of vastzetsystemen is niet toegestaan. Het gebruik van dergelijke zaken kan ervoor zorgen dat de veiligheid volgens de Safety Standard, ECE R129/03, regeling 16 niet meer gewaarborgd is. Bij gebruik van dergelijke zaken zal de garantie vervallen.

## Beperkingen van schade

De garantiebepaling als hierboven uiteengezet is exclusief en vervangt alle andere, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Onder geen beding zal de fabrikant, de importeur of dealer verantwoordelijk zijn voor schade (incidentele schade of gevolgschade) die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruik van dit product.

## Gegevens aangekochte Carrot 3

Serienummer Carrot 3

---

Datum van aankoop

---

Naam

---

Adres

---

Postcode/Plaats

---

Telefoonnummer

---

Emailadres

---

Dealer (stempel)

*In de wereld van kindershulpmiddelen  
proberen wij het verschil te maken.*

*Eerluck biedt kindershulpmiddelen met  
het doel dat kinderen en hun gezinnen  
op een zo normaal mogelijke manier  
kunnen deelnemen aan de maatschappij.*



Jelle Zijlstraweg 66D  
1689 ZX ZWAAG  
Telefoon +31 (0)229 745 070  
info@eerluck.nl  
www.eerluck.nl