

Gebruikershandleiding

# Carrot 3 XL



*eerluck*

VOOR EEN EERLUCK ADVIES

# Inhoud

	Pagina
Inleiding	3
Veiligheidsadvies	4/5
Belangrijke aandachtspunten	6
Certificering	7
Kenmerken	8
Standaard montage	9
Isofix montage	9
Hoofdsteun	10
Schoudersteun	10
H-fixatie	11
Zitdiepte instellen	11
Rugleuning	12
Optioneel afneembaar gepolsterd werkblad	13
Optioneel wigkussen	13
Optionele kruisgordel	13
Veilig vastzetten	14-16
Verzorging en onderhoud	17
Garantie	18
Gegevens aangekochte Carrot 3 XL	18

## Inleiding

De Carrot 3 XL autostoel is ontwikkeld om extra steun te geven aan jong volwassenen die moeite hebben om op de juiste manier te zitten in een standaard autostoel.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de Carrot 3 XL autostoel. Denk hierbij aan veiligheid en methodes om een optimale zithouding te realiseren. Lees alle informatie in deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de Carrot 3 XL in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Zorg dat iedereen die van de Carrot 3 XL gebruik maakt op de hoogte is van de inhoud van deze handleiding en begrijpt hoe hij/zij de Carrot 3 XL veilig kan gebruiken.

Deze instructies vormen een leidraad voor de diverse instellingen ten behoeve van professionals, maar ze bieden ook informatie over hoe de Carrot 3 XL veilig kan worden gebruikt, onderhouden, gecontroleerd en op de juiste wijze in elkaar kan worden gezet door ieder die het zitsysteem gebruikt.

Het is aan te bevelen een ervaren persoon te betrekken bij het toepassen en instellen van het product. Deze deskundige kan de eindgebruiker optimaal gebruik laten maken van de Carrot 3 XL op het gebied van comfort en ondersteuning. Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het toepassen en instellen van de Carrot 3 XL, neem dan altijd contact op met uw dealer. De contactgegevens vindt u achterin deze handleiding.

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product, we hopen dat u veel plezier en gebruiksgemak zult hebben van uw Carrot 3 XL autostoel.

### **Fabrikant**

SEEDS Co., Ltd.  
705-16, Meshiro,  
Isahaya, Nagasaki,  
854-0007  
Japan

### **Productiebedrijf**

Marubishi Industry Co., Ltd.  
1251-3, Honjo,  
Komaki, Aichi,  
485-8505  
Japan

### **Europees importeur**

RehaNorm GmbH & Co. KG  
Am Ockenheimer Graben 50  
55411 Bingen  
Germany

## Veiligheidsadvies

RehaNorm Bingen GmbH staat garant voor de levering van producten die aan de hoogste eisen voldoen. De producten uit het leveringsprogramma voldoen aan de essentiële veiligheid- en milieueisen, zoals deze in de Europese richtlijnen zijn vastgelegd. Maar een onjuist gebruik van de producten brengt gebruikers mogelijk in gevaar en daarom raadt RehaNorm Bingen GmbH u sterk aan de volgende informatie te allen tijde ter harte te nemen.



Verspreid door de handleiding vindt u aandachtspunten, aangegeven met dit symbool.

- De richtlijn voor gebruik van deze autostoel zijn jong volwassene in gewichtsklasse tussen 40 en 75 kg, minimaal 145 cm en maximaal 180 cm. De Carrot 3 XL is succesvol gecrashtest met een dummy van 75 kg.
- Gebruik de Carrot 3 XL alleen in de rijrichting.
- Wijzig nooit iets aan de constructie van de Carrot 3 XL, tenzij dit in het bijzonder vermeld is in deze gebruikershandleiding.
- Stel de gordels van de autostoel zo in dat deze de inzittende goed fixeert. Een juist aangebrachte gordel heeft geen speling en zit niet gedraaid. De gordel drukt niet tegen de inzittende zijn/haar lichaam en drukt de inzittende niet in een onnatuurlijke houding.
- Bevestig deze autostoel met de bovenste en onderste bevestigingsbanden aan de autostoel/-bank. Gebruik altijd de standaard 3-puntsgordel die in de auto aanwezig is!
- Bevestig de H-fixatie van de Carrot 3 XL en de standaard 3-puntsgordel stevig zodat de inzittende goed in de stoel zit.
- Volg alle instructies op de autostoel en in deze handleiding nauwkeurig.
- Gebruik deze autostoel alleen in auto's met een 3-puntsgordel volgens ECE regeling 16 of andere gelijke standaards.
- Om letsel door verborgen schade te voorkomen, gebruik de autostoel niet meer na een matig of ernstig ongeluk.
- Gebruik de autostoel niet zonder bekleding/hoezenset.
- De bekleding/hoezenset mag/mogen alleen vervangen worden voor een door de fabrikant geadviseerde bekleding/hoezenset.
- De handleiding dient opgeborgen te worden in de zak achterop de rugleuning van de autostoel.

- Deze autostoel mag niet gebruikt worden in huis, op een boot of andere niet gecertificeerde toepassingen.
- De achterbank van de auto is de meest veilige plaats voor een correcte montage van de autostoel. Stel de veiligheid van de inzittende voorop en neem de gebruikershandleiding van uw auto door.
- Als de Carrot 3 XL gebruikt wordt in een auto met airbags, neem de gebruikershandleiding van uw auto door voor de montage van de autostoel.
- Til de autostoel nooit op aan de verstelknop of aan de H-fixatie. Dit kan schade veroorzaken aan de verstelknop en de gordelband van de fixatie. Draag de autostoel altijd aan de schaal van de autostoel.
- Demonteer nooit de H-fixatie en gordelbanden uit de autostoel. Verwijder nooit de gespen of de gespssluitingen van de H-fixatie of de gordelbanden. Ze kunnen niet opnieuw bevestigd worden na verwijdering. Als deze incorrect zijn gemonteerd kan de autostoel niet functioneren als beoogd.
- De primaire bescherming van inzittende in een auto bij een ongeluk zijn de 3-puntsgordel en het chassis van de auto zelf; een autostoel kan een jong volwassene niet beschermen als een auto zwaar beschadigd is. Hoe dan ook, een juist gemonteerde autostoel zal deze de kans op overleven vergroten. Wees er zeker van dat alle gebruikers op de hoogte zijn van het op de juiste manier gebruiken van de Carrot 3 XL!
- Wanneer de Carrot 3 XL niet in gebruik is, dient deze ook vastgezet te zijn in de auto. In geval van een ongeluk kan een 'losse' autostoel de inzittende(n) verwonden.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet wanneer deze niet correct (volgens deze gebruikershandleiding) is gemonteerd. Gebruik geen andere gordels of polsteringen als beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet (zonder test van de leverancier), wanneer u een ongeluk met de autostoel heeft gehad.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet op de bijrijdersstoel wanneer de versnellingspook en/of handrem gehinderd worden.
- Gebruik geen beschadigde 3-puntsgordels.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet in auto's waar geen 3-puntsgordel aanwezig is.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet in auto's met een 2-puntsgordel.
- Bevestig de Carrot 3 XL niet in zijwaartse of achterwaartse rijrichting. Gebruik de Carrot 3 XL niet op een autostoel met een kleinere zitdiepte van 40 cm.
- Gebruik de Carrot 3 XL niet op een zwaar geprofileerde autostoel, dit kan tot instabiliteit leiden.

## Belangrijke aandachtspunten

- Wees er zeker van dat de autostoel correct is gemonteerd met de bovenste en onderste bevestigingsbanden. Zorg ervoor dat de fixatie juist is gemonteerd, elke keer wanneer de autostoel gebruikt wordt.
- Pas de fixatie aan op de kleding die de gebruiker draagt. Verwijder grote jassen voor de gebruiker plaats neemt in de autostoel.
- Bescherm de autostoel wanneer de auto in de zon geparkeerd staat. Onderdelen van de autostoel kunnen zo heet worden dat het inzittende zich eraan kan branden.
- Berg de Carrot 3 XL op een veilige plaats op wanneer deze niet gebruikt wordt. Plaats geen zware voorwerpen op de autostoel.
- Laat de inzittende niet alleen achter in de auto, ook niet voor een korte tijd.
- Demonteer nooit onderdelen van de Carrot 3 XL en wijzig nooit de montagewijze van de H-fixatie en/of de gordelbanden.
- Laat geen losse voorwerpen als boeken, tassen enz. slingeren achterin de auto. Bij een plotselinge stop kunnen deze voorwerpen letsel veroorzaken.
- Gebruik voor fixatie op uw Isofix-bevestiging de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de stoel gefixeerd wordt d.m.v. de meegeleverde bovenste bevestigingsbanden.
- Een wijziging van en/of aan de Carrot 3 XL geschiedt geheel op eigen risico en onder uw eigen verantwoording. Eerluck BV is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door oneigenlijk gebruik.
- Gebruik niets om de autostoel verhoogd op een autostoel/-bank te monteren. Bij een ongeluk kan de autostoel gaan schuiven en kan deze de gebruiker niet correct meer beschermen.
- Verbiedt kinderen te spelen met de Carrot 3 XL.
- Er wordt aangeraden de Carrot 3 XL in de rechtopstaande positie te gebruiken.

## Certificering



De Carrot 3 XL autostoel is ontwikkeld voor kinderen met een gebruikersgewicht vanaf 40 kg, tot 75 kg. De autostoel is succesvol getest met een dummy van 75 kg.

EU-conformiteitsverklaring voor medische producten (overeenkomstig artikel 19 en bijlage IV, Verordening (EU) 2017/745 (MDR) van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.


Wij verklaren hierbij dat de autostoel Carrot 3 XL voldoet aan de equivalente regels van de Verordening (EU) 2017/745 (MDR) van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. De productie van de Carrot 3 XL wordt gecontroleerd door een kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001, met rekening houdend met de Verordening (EU) 2017/745 (MDR) van 5 april 2017 betreffende medische Hulpmiddelen.



Wanneer u de rugleuning naar achter plaatst, moet u de H-fixatie losser instellen. Als de rugleuning weer rechtop geplaatst wordt, zult u de H-fixatie weer aan moeten trekken. Het naar achter plaat plaatsen van de rug zonder het verstellen van de fixatie kan druk en/of verstikkingsgevaar opleveren.

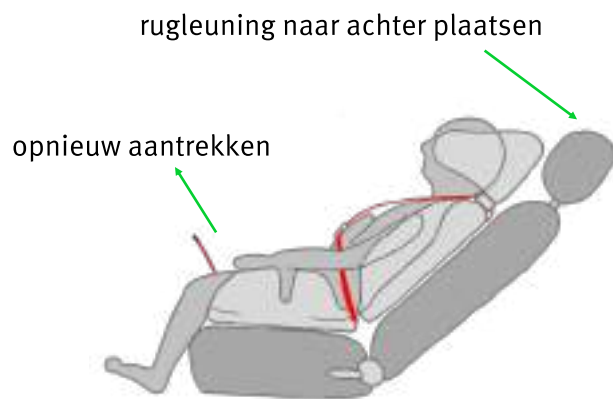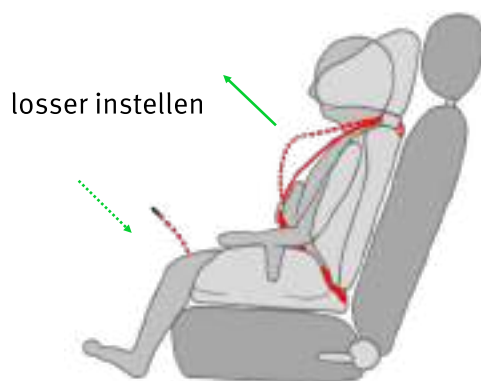


# Kenmerken

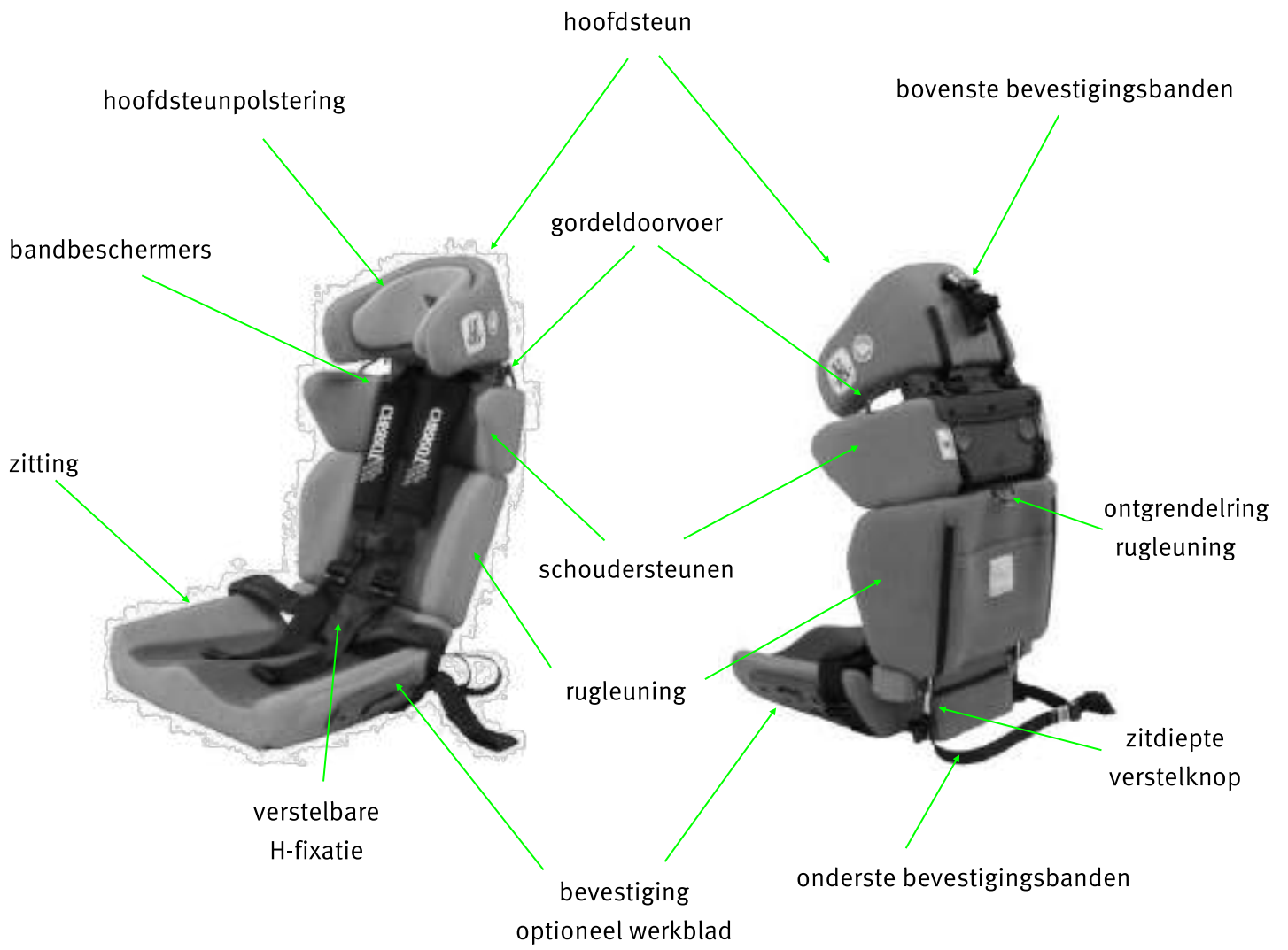

## Standaard montage

Indien uw auto niet is uitgerust met Isofix-bevestiging moet u de meegeleverde bevestigingsbanden gebruiken.


1. Montage van de bevestigingsbanden dient boven en onder aan de autostoel te gebeuren.
2. Bevestig de bovenste bevestigingsband aan de hoofdsteun van de auto. De onderste bevestigingsband gebruikt u om de Carrot 3 XL goed op de autostoel/-bank te plaatsen (A).
3. Maak de steekgespen vast en duw de Carrot 3 XL strak tegen de autostoel aan door de bevestigingsbanden aan te trekken (B).
4. Zorg ervoor dat er geen speling meer in de bevestigingsbanden zit.

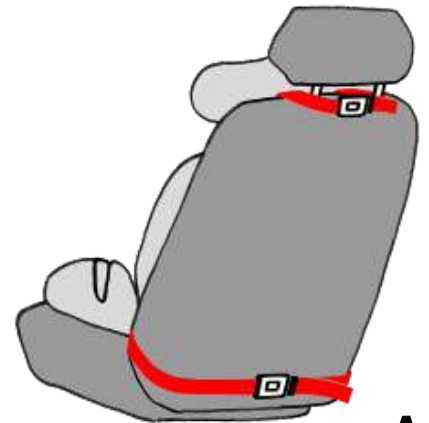

**A**




Indien u de Carrot 3 XL op de passagiersstoel wilt monteren plaats de stoel dan zo ver mogelijk naar achter. Dit zodat er geen eventuele schade kan ontstaan door de airbag.

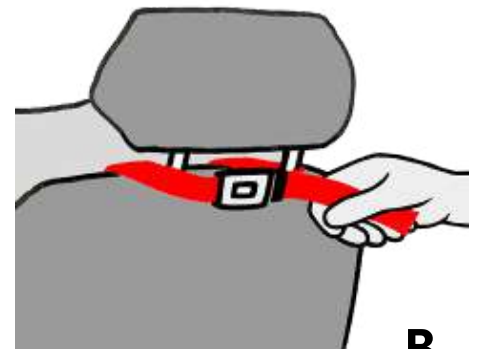

**B**

- Indien de Carrot 3 XL gemonteerd wordt op een achterbank kunnen de bevestigingsbanden te kort zijn. U kunt de bevestigingsbanden dan verticaal monteren.
- Heeft u moeilijkheden met het monteren van de autostoel? Neem alstublieft contact op met de dealer.

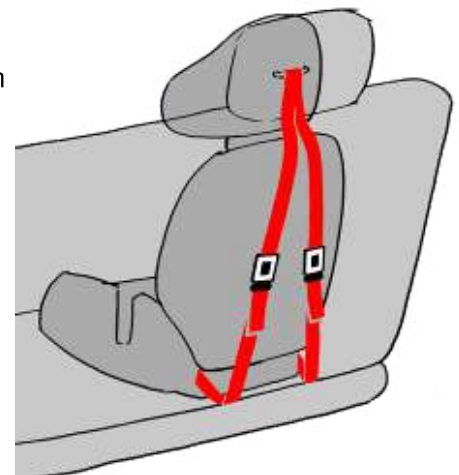

## Isofix montage

Mocht u de Isofix-bevestigingspunten in uw auto willen gebruiken om de Carrot 3 XL autostoel te monteren, dan kunt u hier de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging voor gebruiken. Monteer te allen tijde de bijgeleverde bovenste bevestigingsband aan de standaard autostoel (A).





De Carrot 3 XL moet gemonteerd worden met de bovenste en onderste bevestigingsbanden. Het is niet afdoende om de autostoel alleen met de standaard 3-puntsgordel te fixeren. De onderste bevestigingsbanden worden in geval van montage met Isofix-bevestiging vervangen door de optionele Isofix-bevestigingsplaat. Indien u de bevestigingsbanden niet gebruikt kan de autostoel niet functioneren als beoogd en loopt de inzittende risico op ernstig letsel.

## Hoofdsteun

### Hoofdsteunverstelling

De hoofdsteun kan aangepast worden aan de individuele wensen voor betere bescherming (A). De hoofdsteun kan daarnaast 1,5 cm voorwaarts en 1,5 cm achterwaarts geplaatst worden (B).

Om de hoofdsteun voor- en/of achterwaarts te verstellen heeft u gereedschap nodig. Indien gewenst kunt u uw dealer contacten voor advies omtrent het juiste gereedschap.

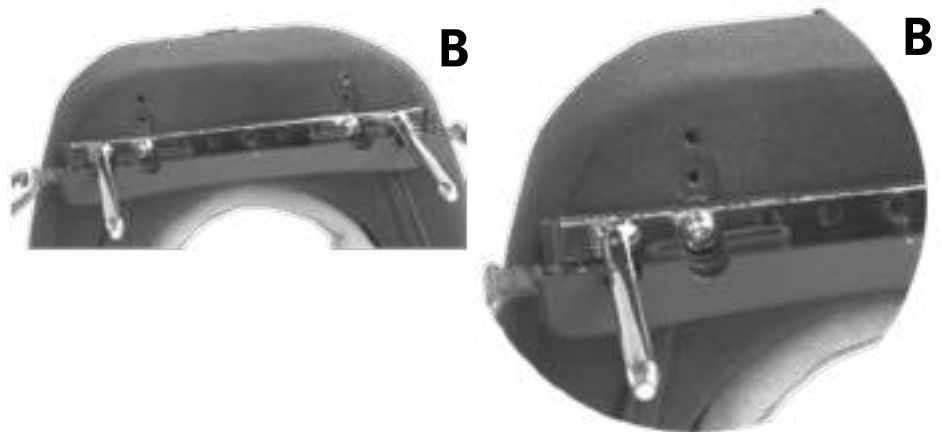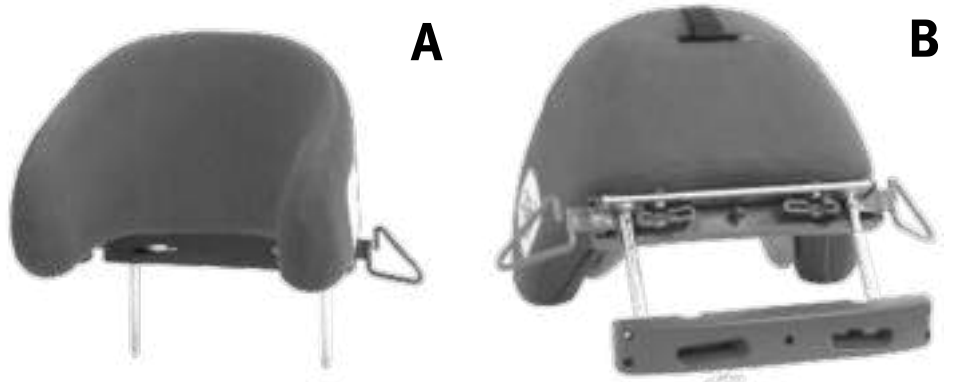

### Hoofdsteunverkleiner

Het verkleiningspolsterdeel van de hoofdsteun kan eenvoudig d.m.v. de klittenbandbevestiging op de gewenste positie worden gemonteerd.




## Schoudersteun

### Breedte-instelling schoudersteun

De schoudersteun kan d.m.v. vijf posities maximaal 10 cm verbreed worden, 5 cm aan beide zijden.


Druk de gele verstelknop (A) in. Houd deze ingedrukt terwijl u de steun uit trekt tot de gewenste positie.

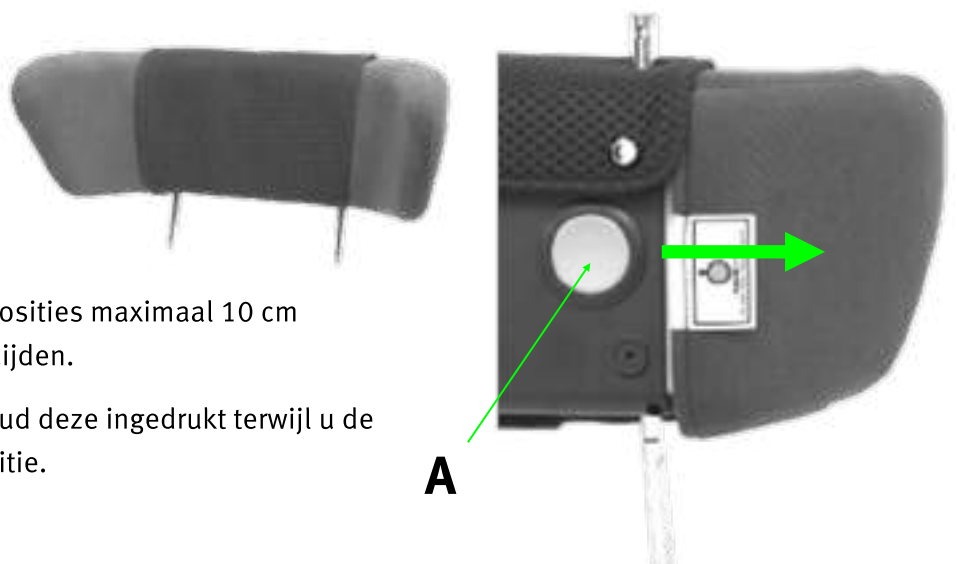

## H-fixatie


### Sluiten veiligheidssluiting

Houd de veiligheidssluiting met één hand vast. Gebruik uw andere hand om de insteekdelen in de sluiting te drukken. Indien u beide insteekdelen juist in de sluiting heeft gedrukt hoort u een klik.

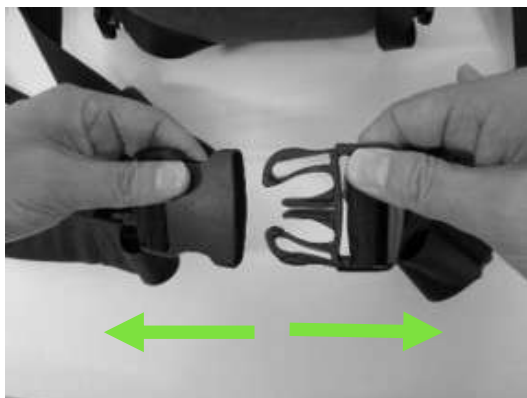

### Openen veiligheidssluiting

Om de veiligheidssluiting te openen drukt u beide drukpunten tegelijk in en trekt het insteekdeel uit het ontvangstdeel.

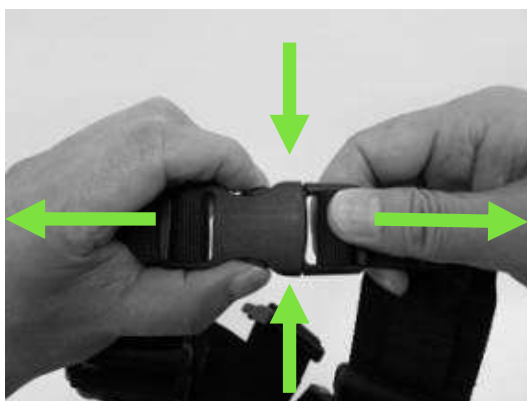


### Bandbeschermers

De bandbeschermers kunnen op gewenste hoogte gemonteerd worden door het klittenband te verschuiven aan de achterkant van de hoofdsteun.



## Zitdiepte instellen

Standaard is de zitdiepte van Carrot 3 XL ingesteld op 42 cm. De zitdiepte kan tot 4 cm verkleint worden d.m.v. de zitdiepteverstelknop (A) aan de onderzijde van de rugleuning. Vraag een deskundige om advies.

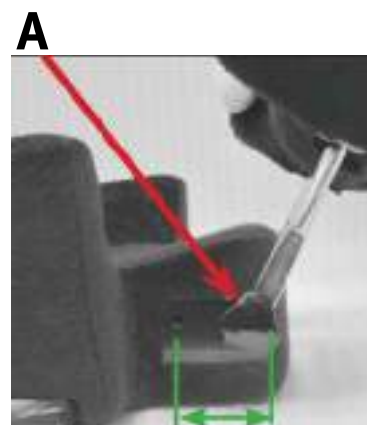


## Rugleuning



De hoogte van de schouderbanden van de H-fixatie zijn gelijk met de hoogte van de rugleuning.

De doorvoer van de schouderbanden moet gelijk of boven de schouders van de gebruiker zitten, parallel aan de vlakke ondergrond.

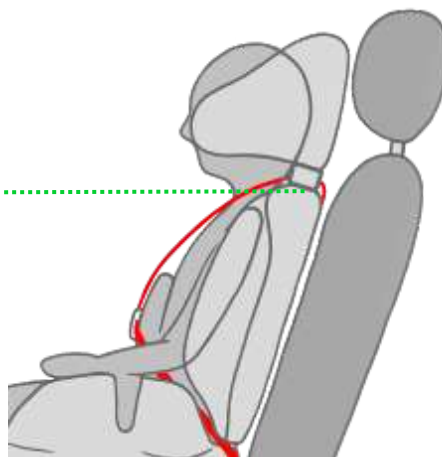

### Instellen van de rughoogte

Ontgrendel de verstelling door aan de D-ring aan achterkant/bovenzijde van de rugleuning te trekken (A).

Trek met één hand aan de D-ring en til met de andere hand de rugleuning omhoog. Stel zo de gewenste hoogte in (B).



### Optionele rugverlenging

Als de inzittende groter wordt kan het noodzakelijk zijn dat de rugleuning verlengd wordt. Om de open ruimte onder het rugleuninggedeelte op te vullen kunt u desgewenst een rugverlenging aanschaffen. Deze zijn er in twee maatvoeringen, 5 en 10 cm hoog en worden eenvoudig op de rugstangen geklikt.



### Optionele 3D rompkussens

Voor een betere positionering kunnen 3D rompkussens worden aangebracht. Deze zitten eenvoudig met klittenband vast aan de rugleuning.



## Optioneel afneembaar gepolsterd werkblad

Wanneer het wenselijk is, kan de Carrot 3 XL voorzien worden van een afneembaar werkblad. Met dit werkblad worden de bovenste extremiteiten ondersteund.



## Optioneel wigkussen

Standaard biedt de zitondersteuning van de Carrot 3 XL in de meeste gevallen voldoende zitstabiliteit. Mocht het echter noodzakelijk zijn om meer stabiliteit te creëren, dan kan dit d.m.v. het optionele wigkussen. Met dit kussen kunnen jong volwassenen met een lagere basistonus comfortabel in de Carrot 3 XL zitten. Het kussen is eenvoudig in gebruik en licht van gewicht. Indien het noodzakelijk is een kleine hoek tussen romp en benen bij gebruikers te creëren geeft dit kussen de nodige ondersteuning.



## Optionele kruisgordel



Deze accessoire is alleen te gebruiken op nieuw aangeschafte Carrot 3 XL autostoelen die op het midden van de zitting twee gaten hebben.

De kruisgordel kan ervoor zorgen dat de inzittende niet meer onderuit kan zakken in de autostoel, biedt extra fixatie. Montage gaat als volgt;







1. Verwijder de hoes aan de onderzijde van de stoel en zie de twee gaten in de polstering.
2. Vouw de gordelbanden dubbel en steek ze aan de bovenzijde van de zitting door de gaten in de bekleding.
3. Trek aan de onderzijde van de zitting de gordelbanden strak en bevestig deze met de klittenbandstroken.
4. Monteer de hoes opnieuw.




## Veilig vastzetten

Als u de Carrot 3 XL autostoel juist in de auto heeft gemonteerd neem dan de volgende instructies door om de gebruiker veilig te vervoeren;

- Maak de veiligheidssluiting los en breng de schouderbanden aan de zijkant van de stoel (A) en plaats de jong volwassene in de stoel (B).
- Breng de H-fixatie aan (C). Zorg ervoor dat de gordelbanden niet gedraaid zitten!
- Sluit eerst de steekgesp ter hoogte van de heup (D). De sluiting zit juist vast als u een klik hoort.
- Trek de gordel aan de zijkant voorzichtig aan zodat de heupgordel goed gefixeerd zit (E). NB. De heup van de inzittende moet zo ver mogelijk naar achter gepositioneerd zijn!
- Sluit vervolgens de steekgesp ter hoogte van de borst (F). De sluiting zit juist vast als u een klik hoort.
- Trek de gordel aan de zijkant voorzichtig aan zodat de schouder-/borstgordel goed gefixeerd zit (G).
- De standaard 3-puntsgordel uit de auto is absoluut nodig om de gebruiker zo veilig mogelijk te vervoeren in de Carrot 3 XL.
- Nadat u de gebruiker heeft gepositioneerd in de Carrot 3 XL met de H-fixatie doet u de 3-puntsgordel uit de auto om. U haalt het heupgedeelte van de autogordel door de daarvoor bestemde gordeldoorvoer (rode plastic delen). Deze moet zo laag mogelijk bevestigd worden zodat de heup in de juiste positie wordt gehouden. U bevestigt de sluiting in het veiligheidsslot (I en J).
- Daarna haalt u de 3-puntsgordel door de gordeldoorvoer en geleid de gordel naar de gordeldoorvoer ter hoogte van de schouder.
- Nadat u de Carrot 3 XL autostoel en de 3-puntsgordel juist heeft gemonteerd moet u er zeker van zijn dat de nek en het gezicht van de gebruiker niet geschaad kunnen worden. Check ook dat de veiligheidssluiting van de 3-puntsgordel lager zit dan de gordeldoorvoer van de Carrot 3 XL. Dit is belangrijk aangezien de gebruiker anders onder de gordel door kan slippen bij een ongeluk. Als de veiligheidssluiting hoger is dan de gordeldoorvoer, bespreek dit met uw dealer!
- De 3-puntsgordel van de auto moet vastgezet worden voor uw gaat rijden. Zorg ervoor dat de gordelband niet gedraaid zit.
- De H-fixatie moet zo gepositioneerd zijn dat de heupgordel zo diep mogelijk is zodat de heup juist gepositioneerd is.
- Als u twijfelt of de Carrot 3 XL autostoel en de gebruiker juist gemonteerd is, neem contact op met uw dealer!

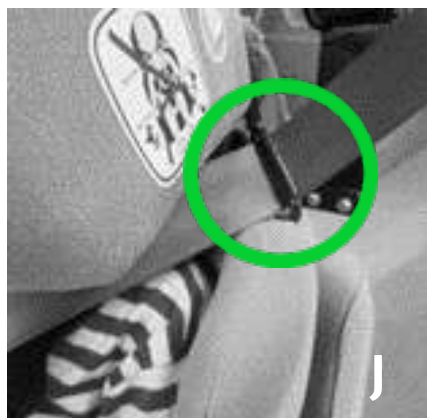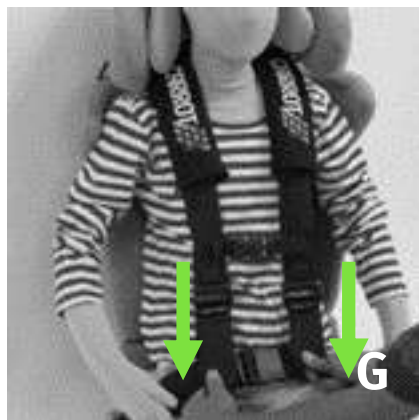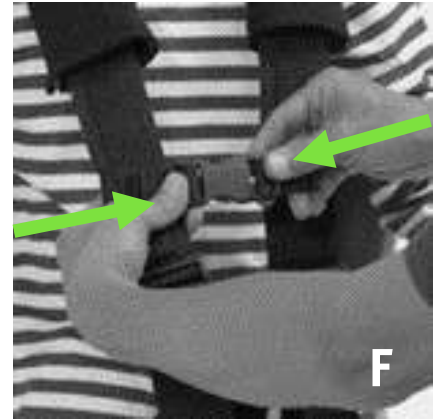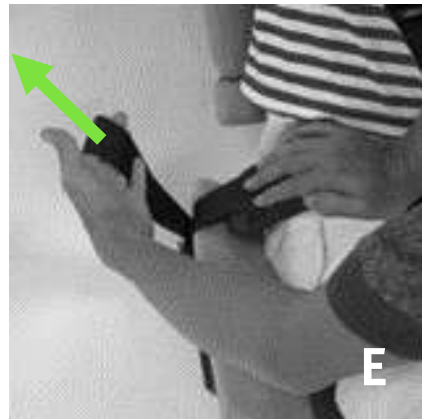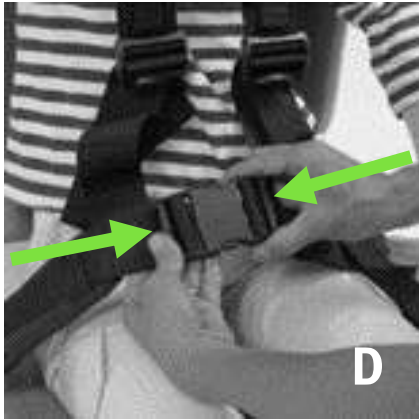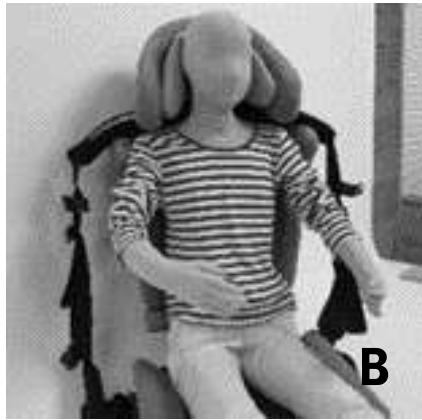

- Trek altijd even aan de H-fixatie om te controleren of de veiligheidssluiting goed vast zit.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de autostoel. Bij het wijzigen van de autostoel terwijl u rijdt loopt u risico op ernstig letsel.
- Als u rijdt zal de autostoel in de rechtopstaande positie geplaatst moeten worden. Als de rugleuning te ver naar achter staat zal de autostoel niet de veiligheid kunnen bieden zoals bedoeld.

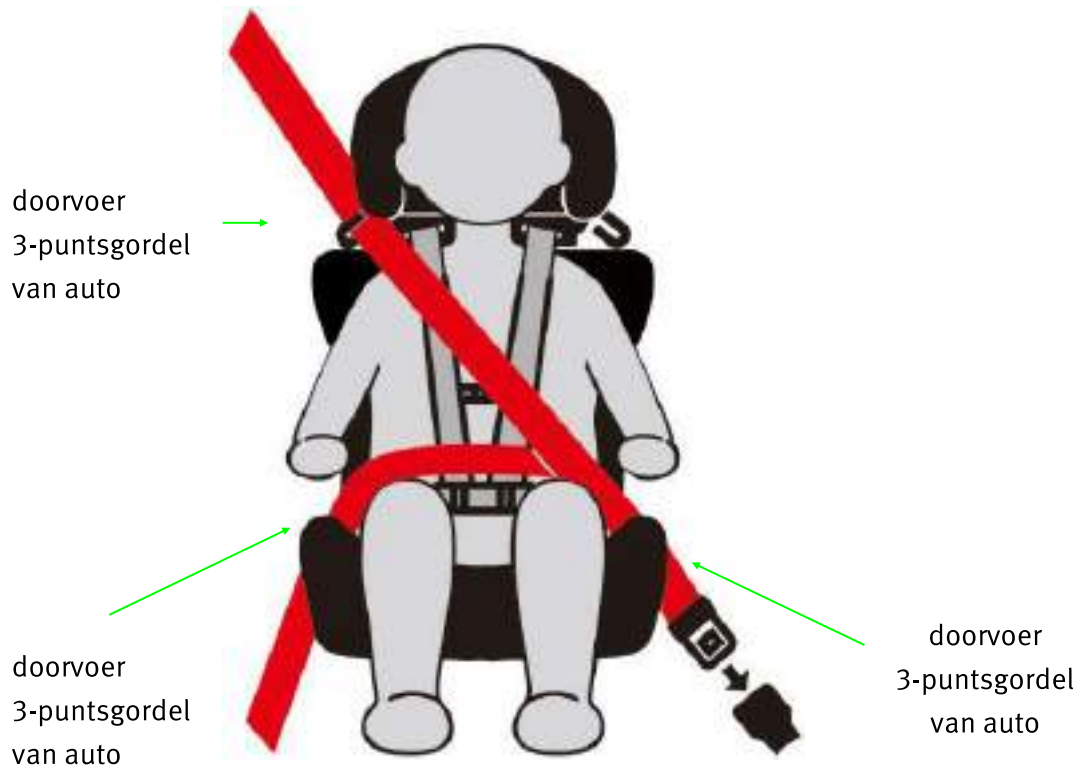

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de standaard 3-puntsgordel te gebruiken!



Het is niet afdoende om de gebruiker alleen te fixeren met de H-fixatie van de Carrot 3 XL. Het is wettelijk gezien verplicht de 3-puntsgordel uit de auto te gebruiken bij het vervoeren van personen in een autostoel. Indien u de 3-puntsgordel niet gebruikt loopt u het risico op ernstig letsel.

## **Verzorging en onderhoud**

### **Verwijderen van bekleding/hoezen**

Verwijder de bekleding/hoezen niet zelf aangezien het niet eenvoudig is en u heeft hier gereedschap voor nodig. Vraag uw dealer om de bekleding/hoezen te verwijderen/vervangen.

### **Reinigen van bekleding/hoezen, polstering en kussens**

Bekleding/hoezen; maak deze schoon met een spons en koud water met een zacht schoonmaakmiddel. Droog na met een handdoek.

Polstering en kussens; maak deze schoon in een handwas met koud water en een zacht schoonmaakmiddel. Bij voorkeur liggend laten drogen. Niet bleken, wassen in wasmachine, drogen in wasdroger en/of strijken. Schoonhouden is belangrijk, maar wassen kan schade aan de bekleding aanbrengen. Als uw schade aan de bekleding/hoezen heeft, dan dient dit vervangen te worden. Een periodieke vervanging is aan te raden.

### **Het 'klik'-geluid van de H-fixatie**

Als de gebruiker wel eens eet en/of drinkt in de autostoel, dan dient u periodiek de steekgespen te checken. Als u de 'klik' niet hoort, dan moet u de steekgespen laten vervangen. Informeer bij uw dealer!

### **De H-fixatie**

Demonteer nooit de H-fixatie en verwijder nooit de steekgespen van de H-fixatie. Ze kunnen niet opnieuw aangebracht worden als ze gedemonteerd zijn geweest. De autostoel zal niet meer de veiligheid bieden die deze behoort te bieden.

# Garantie

## Beperkte eenjarige garantie

Wij bieden u een jaar garantie op de Carrot 3 XL autostoel. Ingangsdatum is datum van levering (zie originele factuur). U ontvangt garantie op materialen. Uw aankoopbewijs is in geval van garantie vereist.

Indien u bij een defect voor garantie in aanmerking wenst te komen, neem contact op met de dealer die de Carrot 3 XL aan u geleverd heeft. Uw aankoopbewijs is hierbij vereist.

## Garantievoorwaarden

U heeft geen garantie indien de schade is ontstaan door nalatigheid, verkeerd gebruik en/of indien de autostoel niet is gebruikt als beschreven in deze gebruikshandleiding.

Het gebruik van niet-Carrot 3 XL bekleding/hoezen, kussens, speelgoed, accessoires en/of vastzetsystemen is niet toegestaan. Het gebruik van dergelijke zaken kan ervoor zorgen dat de veiligheid volgens de Safety Standard, ECE regeling 16, niet meer gewaarborgd is. Bij gebruik van dergelijke zaken zal de garantie vervallen.

## Beperkingen van schade

De garantiebepaling als hierboven uiteengezet is exclusief en vervangt alle andere, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Onder geen beding zal de fabrikant, de importeur of dealer verantwoordelijk zijn voor schade (incidentele schade of gevolgschade) die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruik van dit product.

## Gegevens aangekochte Carrot 3 XL

Serienummer Carrot 3 XL

---

Datum van aankoop

---

Naam

---

Adres

---

Postcode/Plaats

---

Telefoonnummer

---

Emailadres

---

Dealer (stempel)



*In de wereld van kinderpulpmiddelen  
proberen wij het verschil te maken.*

*Eerluck biedt kinderpulpmiddelen met  
het doel dat kinderen en hun gezinnen  
op een zo normaal mogelijke manier  
kunnen deelnemen aan de maatschappij.*



Jelle Zijlstraweg 66D  
1689 ZX ZWAAG  
Telefoon +31 (0)229 745 070  
info@eerluck.nl  
www.eerluck.nl