

Gebruikershandleiding

Draaiplaat met Isofix-bevestiging



eerluck

VOOR EEN EERLUCK ADVIES

Inhoud

	Pagina
Inleiding	3
Veiligheidsadvies	4/5
Certificering	5
Belangrijke aandachtspunten	6
Monteer de Carrot 3 op de draaiplaat	7
Monteer de autostoel met draaiplaat in de Isofix-bevestiging van de auto	7
Het instellen van de rughoek	8
Instellen bevestigingbeugel tot bodem van auto	8
Draaien van draaiplaat	9
De draaiplaat demonteren	9
Draaiplaat omkeren voor gebruik op links of rechts	10/11
Optionele	12
Optioneel afsteunpunt	12
Optioneel beschermkussen	12
Optionele kantelblokjes	12
Garantie	13

Inleiding

De Carrot 3 autostoel is ontwikkeld om extra steun te geven aan kinderen die moeite hebben om op de juiste manier te zitten in een standaard autostoel. Deze handleiding geeft aan hoe de bijgeleverde draaiplaat met Isofix-bevestiging juist te monteren en gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de draaiplaat met Isofix-bevestiging. Denk hierbij aan veiligheid en methodes om een optimale zithouding te realiseren. Lees alle informatie in deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de draaiplaat in gebruik neemt en bewaar de gebruikershandleiding in het achtervakje van de rugleuning van de Carrot 3 autostoel. Zorg dat iedereen die de draaiplaat gebruikt op de hoogte is van de inhoud van deze handleiding en begrijpt hoe hij/zij de Carrot 3 met draaiplaat en Isofix-bevestiging veilig kan gebruiken.

Met de draaiplaat heeft u gekozen voor een hoog gekwalificeerd product. Dankzij de extreem solide constructie kan de draaiplaat jarenlang gebruikt worden. Uw dealer kan u helpen met het juist in elkaar zetten van het product.

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product, we hopen dat u veel plezier en gebruiksgemak zult hebben van uw Carrot 3 autostoel en draaiplaat met Isofix-bevestiging.

EG-verklaring van overeenstemming van medische hulpmiddelen (in overeenstemming met Annexes II, V, VI en VIII o\van de EC richtlijnen 93/42/EEC aangaande medische hulpmiddelen:

Hierbij verklaren wij dat de draaiplaat met Isofix-bevestiging gelijk is aan de relevante bepalingen van de wet en de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42 ECC. De draaiplaat met Isofix-bevestiging wordt geproduceerd onder de controle van de kwaliteit van het beheer in overeenstemming te DIN EN IOS 9100 en DIN EN 46001.

De draaiplaat met Isofix-bevestiging is getest en goedgekeurd volgens de European Safety Standard, ECE R129/03 (Klasse I en III).

Exclusief gedistribueerd door RehaNorm Bingen GmbH

Fabrikant

RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen
Germany

Veiligheidsadvies

RehaNorm Bingen GmbH staat garant voor de levering van producten die aan de hoogste eisen voldoen. De producten uit het leveringsprogramma voldoen aan de essentiële veiligheid- en milieueisen, zoals deze in de Europese richtlijnen zijn vastgelegd. Maar een onjuist gebruik van de producten brengt gebruikers mogelijk in gevaar en daarom raadt RehaNorm Bingen GmbH u sterk aan de volgende informatie te allen tijde ter harte te nemen.

- De volgende autostoelen kunnen niet gebruikt worden i.c.m. de draaiplaat met Isofix-bevestiging:
 - autostoelen zonder Isofix-bevestiging
 - autostoelen die zijwaarts of naar achteren gemonteerd zijn
 - autostoelen die een kleinere zitdiepte dan 40 cm hebben
 - autostoelen met een zware profilering in de stoel wat tot instabiliteit kan leiden
 - autostoelen met een 2-punts veiligheidsgordel
- Gebruik de draaiplaat alleen bij de bovengenoemde autostoelen.
- Gebruik altijd de 5-punts fixatie van de Carrot 3 autostoel plus de standaard 3-punts veiligheidsgordel van de auto.
- Een wijziging aan het product is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in geval van een onjuiste wijziging.
- Alleen voor gebruik in auto's die uitgevoerd zijn met een 3-punts veiligheidsgordel.
- Zorg dat bij montage geen onderdelen van de draaiplaat geklemd zitten door bijvoorbeeld een verplaatsbare stoel of in de deur als u het product op de normale wijze gebruikt.
- Een onjuist gemonteerde draaiplaat kan schade veroorzaken.
- Wij adviseren om voldoende ruimte naar de voorstoel over te houden.
- Controleer het product regelmatig indien u veel op slechte wegen rijdt.
- Bewaar de handleiding ten alle tijden bij de draaiplaat.
- Zorg ervoor dat de Isofix-bevestiging in de auto juist bevestigd is aan de draaiplaat. Dit geldt tevens als er geen kind in de autostoel zit of als er geen autostoel aan de draaiplaat is bevestigd. Bij een onjuiste bevestiging kan de draaiplaat schade aanbrengen bij een ongeluk.
- Gebruik de autostoel niet zonder Isofix-bevestiging om de veiligheid van het kind te waarborgen.
- Laat uw kind niet alleen achter in de auto.
- Gebruik de draaiplaat niet als deze niet juist gemonteerd is zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Gebruik de draaiplaat niet als deze niet stevig genoeg is gemonteerd.
- Gebruik dit product niet als u geen Isofix-bevestiging in de auto heeft.


- Gebruik geen andere (veiligheids-)gordels en banden dan degene die omschreven staan in deze gebruikershandleiding.
- Om letsel door verborgen schade te voorkomen, gebruik de autostoel niet meer na een matig of ernstig ongeval.
- Indien u de draaiplaat op de passagiersstoel voorin gebruikt, zorg ervoor dat de versnellingspook en handrem vrij gebruikt kunnen worden.
- Gebruik geen veiligheidsgordels die aangetast zijn door bijvoorbeeld sigarettenbrandplekken.
- Isofix-bevestiging is zeer eenvoudig in gebruik. U dient er echter voor te zorgen dat niemand hier onjuist mee omgaat. Indien u vragen omtrent het gebruik van de dit product of een reparatie wilt laten uitvoeren neemt u dan contact op met uw dealer.
- Sommige auto's hebben bij het voetengedeelte een opbergruimte. Als de bevestigingsbeugel tot bodem van de auto rust op deze opbergruimte kan dit zorgen voor verminderde stabiliteit in een crash situatie. Neem contact op met de dealer. Wij zullen hem een oplossing proberen te bieden voor dit probleem.

Certificering

De draaiplaat met Isofix-bevestiging is getest en goedgekeurd volgens de European Safety Standard, ECE R129/03 (Klasse I en III).

Belangrijke aandachtspunten

Voordat u de draaiplaat met Isofix-bevestiging in gebruik neemt wees er zeker van dat u deze gebruikershandleiding gelezen heeft. Het kan zijn dat de gebruikershandleiding kan afwijken in verband met de diverse opties van het product. Bewaar de handleiding goed.

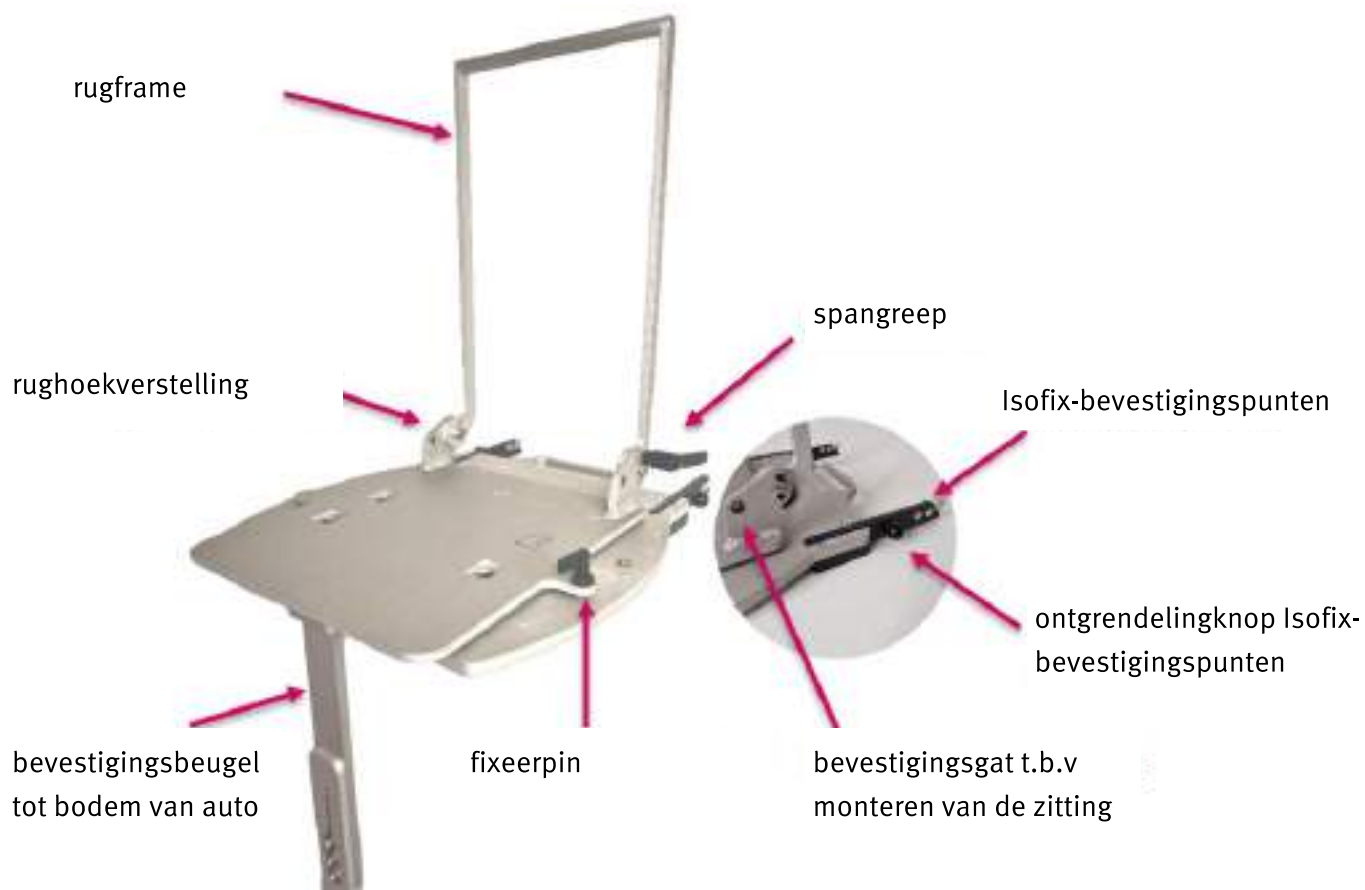

Monteer de Carrot 3 autostoel op de draaiplaat

- Verwijder allereerst de grijze afdekkapjes en stelschroeven van de Carrot 3 autostoel (A).
- Zet nu de autostoel op de draaiplaat zodat de rugleuning tussen het rugframe van de draaiplaat valt (B).
- Bevestig de autostoel op de draaiplaat met de meegeleverde bouten (6x35 mm) die de zitting en rugleuning van de Carrot 3 bij elkaar houden. De bouten moeten stevig vastgezet worden aan beide kanten van de autostoel (C).
- Gebruik zo nodig de zwarte opvullingen om te voorkomen dat de buizen buigen. Hierna schroeft u de stelknop van de rughoek vast (D) in de daarvoor bestemde bevestigingsgaten.



Monteer de autostoel met draaiplaat in de Isofix-bevestiging van de auto

Plaats nu de Carrot 3 autostoel met draaiplaat op de autostoel. Zorg ervoor dat de Isofix-bevestiging van de auto (E) en de draaiplaat op dezelfde hoogte zitten. Daarna kunt u de insteekpunten van de draaiplaat in de ontvangstdelen van de autostoel steken tot u een klik hoort (F). De stoel zit vast wanneer de haken niet omhoog kunnen bewegen. De draaiplaat is juist gemonteerd.




Het instellen van de rughoek

Het rugframe van de draaiplaat en de Carrot 3 autostoel kunnen tegen de rugleuning van de autostoel bevestigd worden als u de stelknop van de rughoekverstelling (G) los draait. U drukt het rugframe van de draaiplaat tegen de autostoel. Fixeer de rughoek met de stelknop door deze stevig aan te draaien.



Bevestiging van bevestigingsbeugel tot bodem van auto


- Draai eerste alle schroeven los van de bevestigingsbeugel aan de onderzijde van de draaiplaat (H).
- Vervolgens kunt u de beugel aanpassen aan de benodigde diepte. Draai de schroeven weer stevig aan.
- Draai de drie schroeven van de bevestigingsbeugel los om de benodigde hoogte te bepalen (I).
- Laat de beugel op de bodem van de auto zakken en draai de schroeven stevig vast.

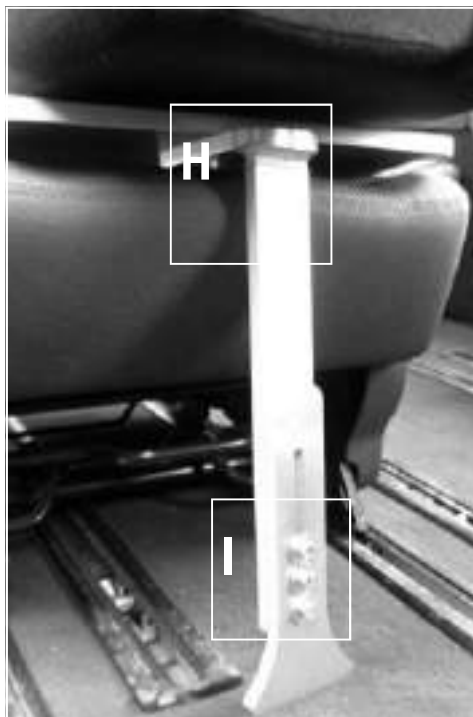

Is de bevestigingsbeugel te kort? Bestel een verlengd afsteunpunt, 36 tot 55 cm.


Draaien van draaiplaat

Om de draaiplaat te kunnen draaien zal de fixeerpunten ontgrendeld moeten worden. De fixeerpunten vindt u op de bovenzijde van de draaiplaat (J), trek en draai deze 180° uit om te ontgrendelen. Nu kunt u de autostoel met draaiplaat draaien naar de buitenzijde van de auto. Vervolgens kunt u de draaiplaat met de fixeerpunten in de gewenste positie vastzetten. Zorg ervoor dat de fixeerpunten in de juiste positie klikt.

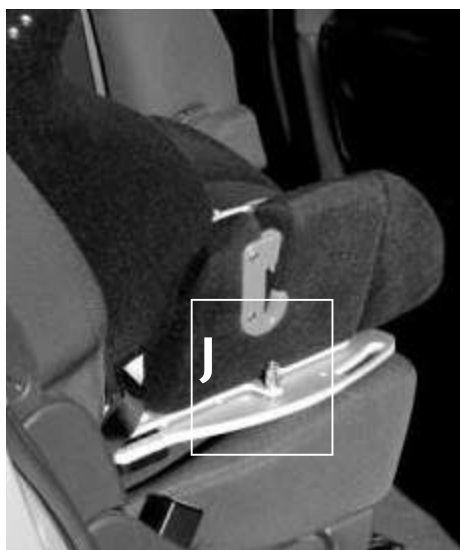

De draaiplaat demonteren

U moet de Isofix-bevestiging ontgrendelen om de draaiplaat te kunnen verwijderen. Ontgrendel de draaiplaat door de zwarte ballen (K) in de rijrichting te drukken aan beide zijden van de draaiplaat. Druk de draaiplaat een paar millimeters terug om de Isofix haken van de auto los te maken en uit de bevestigingskoppeling te halen. Til het geheel op en trek aan de draaiplaat. Nu kunt u de Carrot 3 autostoel inclusief draaiplaat verwijderen uit de auto.

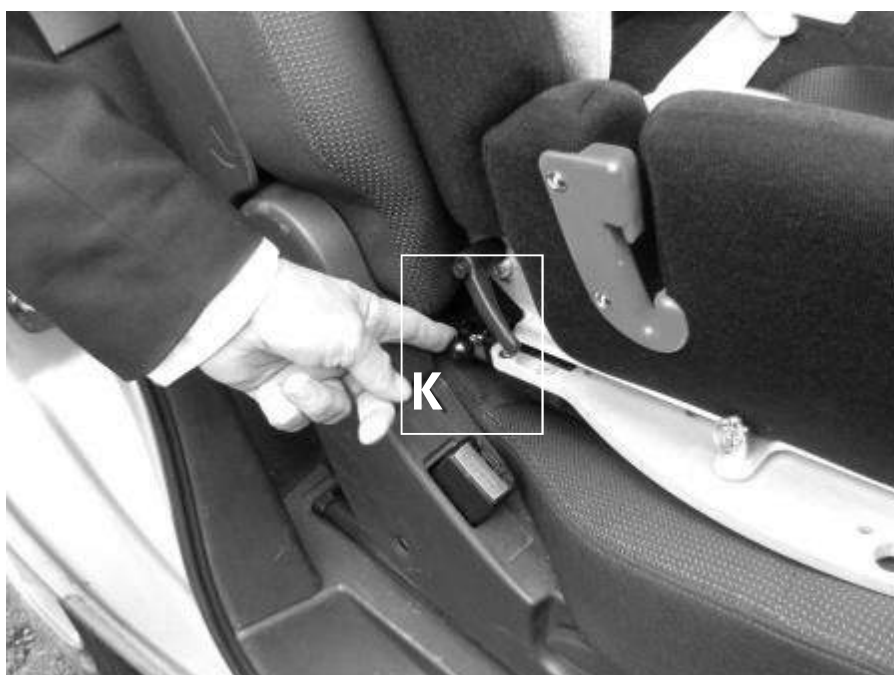

Draaiplaat omkeren voor gebruik op links of rechts

De draaiplaat kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden in de auto. Volg de afbeeldingen zorgvuldig om de draaibaarheid van de plaat te wijzigen.



1

Benodigd gereedschap;
- Inbussteeksleutels maat 4 & 5
- Insteeksleutels maat 19 & 24



2

Draaiplaat met Isofix-bevestiging gemonteerd op links.



3

Demonteer de Isofixbevestiging.



4

Draai de moer van de draaibout los.



5

Haal de bovenste plaat van de onderste plaat en neem het lager van de bout.



6

Neem het lager uit de onderste plaat.



7

Neem de opvulling uit.



8

Draai de montage los.



9

Draai de plaat om en bevestig de montage aan de andere zijde.



Draai de fixeerpennen los.



Monteer de fixeerpennen aan de andere zijde en draai deze goed vast met insteeksleutel maat 19.

Foto's 3 t/m 10 laten zien hoe de beide platen van elkaar gedemonteerd en omgedraaid worden. Om de platen weer op de juiste wijze te in elkaar te zetten volgt u stappen 3 t/m 9 in tegengestelde richting, dus foto 9, 8, 7,6, 5, 4, en 3. Tot slot zet u de fixeerpennen aan de andere zijde volgens foto 11.

Optionele montageset voetsteun aan draaiplaat

Indien de Carrot 3 autostoel een voetplaat gewenst is, maar deze hoeft niet naar buiten te draaien, dan worden de voetsteunen onder de draaiplaat vastgezet in de optionele montageset. De montageset monteert u als volgt;

- Bevestig de blokjes onder de montageplaat bij de daarvoor benodigde gaten.
- Schroef elk blokje vast met de 4 meegeleverde schroeven (6x25mm).
- Om ervoor te zorgen dat de voetsteun geborgd is bevestigd u de borgschroef (6x12mm) nadat de voetsteun bevestigd en juist gepositioneerd is.



De blokjes kunnen in de bekleding van de autostoel/achterbank drukken. Om beschadiging te voorkomen raden we aan de beschermplaat te gebruiken.

Optioneel verlengd afsteunpunt

Is het standaard afsteunpunt te kort omdat bijvoorbeeld de achterbank hoog uitkomt, dan kan een verlengd afsteunpunt bevestigd worden. Dit afsteunpunt is verstelbaar tussen 36 en 55 cm.



Optionele beschermplaat

De beschermplaat is gemaakt van hard schuim en kan onder de draaiplaat Isofix-bevestiging geplaatst worden. Let wel, wij kunnen niet garanderen dat de bekleding van de autostoel/achterbank niet beschadigd. Controleer alstublieft zelf of er geen scherpe zaken in uw bekleding drukken.



Optionele kantelblokjes

Mocht de autostoel waar de draaiplaat Isofix-bevestiging op gemonteerd moet worden erg aflopen aan de achterzijde, kan een kantelblok uitkomst bieden. Op deze wijze kan 3,9 cm opgevuld worden en komt de draaiplaat recht op de autostoel/achterbank te staan. Monteer de kantelblokjes als volgt;

- Schroef allereerst de blokjes op de daarvoor bestemde gaten op de zwarte Isofix-beugels met de meegeleverde schroeven (M6x30 mm).
- Schroef vervolgens deze beugels onder de draaiplaat met de meegeleverde schroeven (M6x20 mm).



Garantie

Beperkte eenjarige garantie

Wij bieden u een jaar garantie op de draaiplaat met Isofix-bevestiging. Ingangsdatum is datum van levering (zie originele factuur). U ontvangt garantie op materialen. Uw aankoopbewijs is in geval van garantie vereist.

Indien u bij een defect voor garantie in aanmerking wenst te komen, neem contact op met de dealer die de draaiplaat met Isofix-bevestiging aan u geleverd heeft. Uw aankoopbewijs is hierbij vereist.

Garantievoorwaarden

U heeft geen garantie indien de schade is ontstaan door nalatigheid, verkeerd gebruik en/of indien de draaiplaat met Isofix-bevestiging niet is gebruikt als beschreven in deze gebruikshandleiding.

Beperkingen van schade

De garantiebepaling als hierboven uiteengezet is exclusief en vervangt alle andere, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Onder geen beding zal de fabrikant, de importeur of dealer verantwoordelijk zijn voor schade (incidentele schade of gevolgschade) die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit product.

Gegevens aangekochte draaiplaat met Isofix-bevestiging

Datum van aankoop

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

Emailadres

Dealer (stempel)

*In de wereld van kinderpulpmiddelen
proberen wij het verschil te maken.*

*Eerluck biedt kinderpulpmiddelen met
het doel dat kinderen en hun gezinnen
op een zo normaal mogelijke manier
kunnen deelnemen aan de maatschappij.*



Jelle Zijlstraweg 66D
1689 ZX ZWAAG
Telefoon +31 (0)229 745 070
info@eerluck.nl
www.eerluck.nl