

Gebruikershandleiding

Eerluck

Autofixatiesysteem

*In de wereld van kinderhulpmiddelen
proberen wij het verschil te maken.*

*Eerluck biedt kinderhulpmiddelen met
het doel dat kinderen en hun gezinnen
op een zo normaal mogelijke manier
kunnen deelnemen aan de maatschappij.*




Jelle Zijlstraweg 66D
1689 ZX ZWAAG
Telefoon +31 (0)229 745 070
info@eerluck.nl
www.eerluck.nl



Onderdelen Eerluck Autofixatiesysteem

Basisband

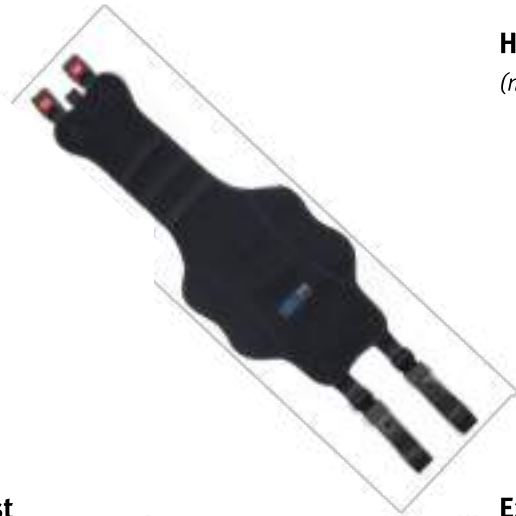

H-stuk

(nodig bij montage om complete 'vaste' stoel)



7-puns fixatievest



Extra band tegen zweven

(nodig bij montage om complete 'vaste' stoel)



Set extra verbindingsbandjes



Veiligheidshamer met gordelsnijder

(uitvoering kan verschillen i.v.m. wisselend aanbod)



Veiligheidssluiting met penslot



Afsluitbare steekgesp



Montage om complete 'vaste' stoel

Leg de basisband om de rugleuning en de bevestigingsbanden over de zitting van de autostoel-/bank (7).

Het meegeleverde H-stuk klikt u aan de bevestigingsbanden welke over de zitting gaan (8). De connectieband (A) valt tussen de stoelpoten. De bevestigingsbanden gaan langs de achterzijde van de rugleuning omhoog naar het ontvangsteel van de veiligheidsgordel. Indien mogelijk bevestigd u de basisband aan de bovenzijde tussen de pinnen van de hoofdsteun.


De meegeleverde 'extra band tegen zweven' (9) brengt u om de stoel in de zithoek heen. Dit voorkomt het 'zweven' van de basisband boven de zitting.

NB. Het 7de punt valt ook achter deze 'extra band tegen zweven' (10). Vervolgens gaat deze over de zitting naar de klepsluiting aan de achterzijde van de rugleuning (11).

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen (12). Stel de gewenste lengte van de verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven (6).



Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto!

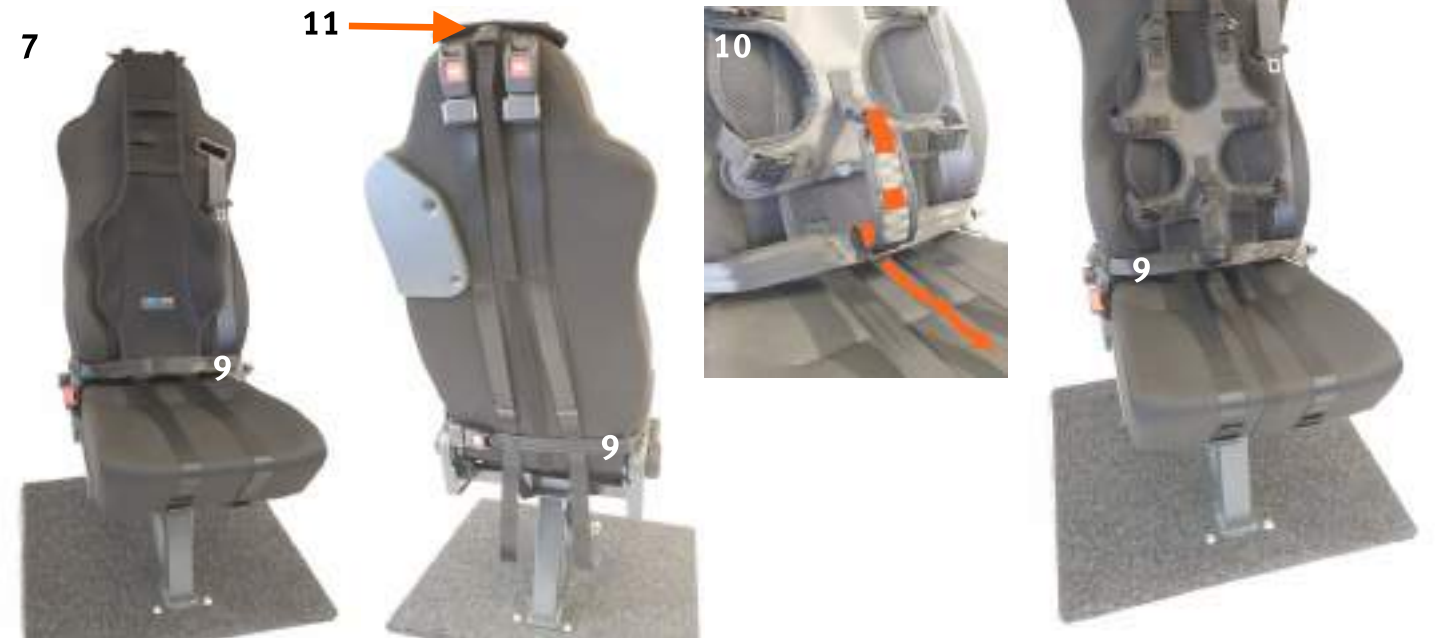

Montage 'alleen' om rugleuning

Leg de basisband om de rugleuning van de autostoel -/bank (1). Klap de autostoel-/bank indien nodig even voorover. De basisband gaat aan de onderzijde tussen de rugleuning en de zitting (2) en aan de bovenzijde tussen de pinnen van de hoofdsteun (3) door. Voor gebruik van het fixatiesysteem bij langere kinderen wordt de basisband over de hoofdsteun gemonteerd.

Trek aan de achterzijde de twee bevestigingsbanden (4) aan. De twee veiligheidssluitingen zitten hierbij dus aan de achterzijde van de rugleuning .

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen. Het 7e punt gaat tussen de rugleuning en zitting door en wordt aan de achterzijde geklemd in de klepsluiting (5). Stel de gewenste lengte van de verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven (6).



Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto!



Wetgeving en veiligheid

Voor de meest actuele wetgeving omtrent kinderzitjes verzoeken wij u de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te bezoeken, www.veiligheid.nl. Woont u in België? Bezoek dan de website van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, www.bivv.be.



Bij gebruik van het Eerluck Autofixatiesysteem blijft gebruik van de standaard 3-punts veiligheidsgordel verplicht!



Het gebruik van het Eerluck Autofixatiesysteem is te allen tijde op eigen risico.



Draai de afsluitbare steekgespen alleen extra op slot als dit echt nodig is!



Wij adviseren (zeker bij gebruik door derden) om met alle betrokkenen af te stemmen dat een persoon vervoerd wordt met een Eerluck Autofixatiesysteem.



Zorg dat de meegeleverde gordelsnijder binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is!

Afsluitbare steekgespen



Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met afsluitbare steekgespen? Draai deze alleen op slot indien het echt noodzakelijk is! Probeer na verloop van tijd eens uit of u wellicht alle of een aantal van de zeven steekgespen niet meer op slot hoeft te draaien.

Veiligheidssluitingen met pensloten



Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met veiligheidssluitingen met pensloten? Zorg ervoor dat de meegeleverde pen binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is!

CE-markering



Wij verklaren hierbij dat het Eerluck Autofixatiesysteem voldoet aan de gelijkwaardige regels van het medisch product en de richtlijn 93/42EEG.

Onderhoud



Onze fixaties kunnen afgenomen worden met een licht vochtige doek. Gebruik voor reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen en was ze niet in de wasmachine!

Gebruik in combinatie met zitverhoger

Het Eerluck Autofixatiesysteem kan gebruikt worden in combinatie met een zitverhoger. Dit dient een zitverhoger *zonder* rugleuning te zijn. Het is uiteraard belangrijk dat u het fixatievest op de juiste hoogte in stelt. Een extra aandachtspunt is het 7e punt, de band die tussen de benen door gaat. Deze moet achter de zitverhoger langs te gaan!



Optionele afdekkapje veiligheidsgordel

Als een kind/volwassene in de auto zelfstandig de sluiting van verplichte 3-punsgordel opent ontstaat er een gevaarlijke situatie. Voorkom dit met het afdekkapje voor het gordelinsteekpunt. Uiteraard verkrijgbaar in onze webshop.



Aandachtspunten juiste instelling

Zorg ervoor dat het fixatievest juist ingesteld is. Zorg ervoor dat de verbindingsbandjes tussen het vest en de basisband op de juiste lengte afgesteld zijn, niet te los en zeker ook niet te strak. Het fixatievest moet comfortabel zitten voor degene die erin plaats neemt.

Schouderbanden door de juiste doorvoer halen.



Zorg ervoor dat het fixatievest niet te hoog gemonteerd is.

Montagepunten ter hoogte van de oksel, bevinden zich bij de oksel.

Montagepunten ter hoogte van de heup, bevinden zich bij de heup.

Bevestig te allen tijde de verplichte 3-punsgordel welke in de auto/taxibus aanwezig is!

